



Nombre

Muñequera boomerang con dedo pulgar libre

Wrist wrap with open thumb

Código externo

01.01.M3

16.M3

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esquinces y dolores articulares. Su diseño abierto universal permite una fácil colocación y ajuste, adaptándose a diferentes anatomías y necesidades terapéuticas. Abarca desde la muñeca hasta la parte media de los metacarpianos. Puede utilizarse en ambas muñecas.

Modo de acción

El alivio en distensiones, esquinces y demás lesiones de la muñeca se logra mediante la estabilización de la articulación radio carpiana, aplicando compresión moderada sobre la zona. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración. El tipo de ajuste permite aplicar la compresión necesaria, la cual puede ir variando durante el tratamiento.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3,5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es confortable al contacto con la piel y contribuye a la a contención del calor.

Tabla de talles / Código de barras

UNIVERSAL

7798094546094

Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla

Envase	Bolsa	
Cantidad	1 unidad	
Color	Negro	
NCM	6307.90.90	
Peso sin envase		35 g / 0,035 Kg
Peso con envase		
Volumen con envase		
Industria/Origen		Argentina

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:

Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA -Araentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor: www.ptm.global - info@ptm.global Instrucciones de uso

- 1. Quitar la protección del abrojo interno.
- 2. Introducir el pulgar por el orificio de la muñequera. El logo PROFIT debe quedar del lado de los dedos.
- 3. Tomar el lado más corto de la muñequera y rodear la muñeca hasta el punto máximo de extensión. Fijar abrochando el abrojo interno en la parte interna larga de la muñequera.
- 4. Tomar la tira de ajuste, rodear la muñeca y cerrar abrojo.
- 5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.





Composición



Interior: Policloropreno 100%,









- * Contusiones
- * Esguinces
- * Distensiones
- * Debilidad muscular
- * Dolores reumáticos
- * Tendinitis
- * Inflamación tendinosa
- * Artritis de muñeca
- * Tenosinovitis
- * Síndrome del túnel carpiano
- * Artrosis

Productos relacionados

M1 - M3 - M4 - EM1 - MAS



Exterior: Poliamida 100%