

ACTIVÁ TUS DÍAS

Nombre

## Muñeguera Abierta Universal

Universal Open Wrist Support

Descripción

Contribuve rápida desinflamación una recuperación de lesiones leves, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. El ajuste regulable y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esquinces y dolores articulares. Su diseño abierto universal permite una fácil colocación y ajuste, adaptándose a diferentes anatomías y necesidades terapéuticas. Abarca desde la muñeca hasta la parte media de los metacarpianos y la articulación del dedo pulgar. Puede utilizarse en ambas muñecas.



Código externo

01.01.MAU

16.MAU

Modo de acción

La muñeguera aplica fuerzas multidireccionales, que mantienen la articulación en una posición neutra. El alivio en distensiones, esquinces y demás lesiones de la muñeca se logra mediante la estabilización de la articulación radio carpiana, aplicando compresión moderada sobre la zona.

## Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara interna y externa. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento ofrece control de elasticidad y una suave textura.

Tabla de talles / Código de barras

Se adapta a todos los talles.

Universal

7798128675493

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

- 1. Desabrochar el abrojo.
- 2. Introducir el dedo pulgar dentro de la muñequera.
- 3. Envolver muñeca con banda de neoprene y ajustar.
- 4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Or	igen <b>Argentina</b>

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:

Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:** Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA -

Argenting - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor: www.ptm.global - info@ptm.global Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado el abrojo. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.















- \* Contusiones
- \* Esguinces
- \* Distensiones
- \* Debilidad muscular
- \* Dolores reumáticos
- \* Tendinitis
- \* Inflamación tendinosa
- \* Artritis de muñeca

Interior: Policloropreno 100% Exterior: Poliamida 100%

ficha\_de\_producto\_MAU\_v.2

M1 - M2 - M3 - M4 - EM1 - MAS - TAU - RAU