



Nombre

## Inmovilizador de dedo pulgar

### Thumb splint

Código externo

01.02.6020

Código interno

25.6020

Descripción

Brinda inmovilización del dedo pulgar mediante el uso de una ballena rígida de aluminio, que contiene la articulación e impiden que se desplace lateralmente, se extienda o flexione. Indicada para el tratamiento de esguinces, fracturas y traumatismos. Cuenta con tiras regulables que permiten ajustar el producto adaptándose a la anatomía de cada usuario. Fabricado en tela bondeada que optimiza el confort y otorga calor terapéutico, ayudando a la desinflamación de la articulación. El producto puede ser utilizado en ambas manos.

Modo de acción

El dedo pulgar se encuentra inmovilizado por una ballena de aluminio. Se puede adaptar a la necesidad del tratamiento regulando el ajuste de la banda que rodea la muñeca. El alivio en distensiones, inflamaciones, esguinces y demás traumatismos del dedo se logra mediante la estabilización de la articulación. Brinda calor terapéutico promoviendo el aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Elaborado a partir de un textil bondeado, compuesto por goma espuma, jersey de algodón y velour de poliamida. El laminado interno de jersey de algodón es hipoalergénico, resultando amigable al contacto con la piel, mientras que el velour de poliamida de la cara externa cumple la función de sujeción del abrojo y es agradable al tacto. El interior del material está compuesto por goma espuma de poliuretano de 8 milímetros de espesor, la cual otorga un acolchado cómodo y protege la articulación de posibles golpes.

Tabla de talles / Código de barras

**UNIVERSAL** 7798094547930

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Posicionar el producto con la ballena metálica sobre la cara externa del dedo pulgar.
3. Tomar la cinta de abrojo y rodear el dedo.
4. Ajustar las dos tiras elásticas rodeando la muñeca y abrochar.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos y extraer la ballena. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- \* Afecciones ligamentarias
- \* Esguinces severos
- \* Luxación del dedo pulgar
- \* Tendinitis
- \* Artrosis trapecio metacarpiana -rizartrosis
- \* Artrosis

Composición

Espuma de Poliuretano 36% Poliamida 32% Algodón 32%.

Productos relacionados

M5 - M6 - M7 - M8 - 6000 - 6021

Envase	Caja de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	43 g. / 0.043 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global