

# PROFIT

ACTIVÁ TUS DÍAS



Nombre

## Bolsa para Hielo y Agua Caliente Ice Hot Bag

Código externo

10.01.BH

Código interno

40.BH

Descripción

Brinda frío o calor terapéutico, ayudando a aliviar lesiones, contracturas, desgarros y dolencias. Su materialidad y sistema de cierre con tapa hacen un producto hermético e impermeable. Se adapta a la forma del cuerpo por lo que resulta anatómico y cómodo al uso.

Modo de acción

El frío, por su capacidad antiinflamatoria, ayuda en casos de lesiones con proceso inflamatorio como desgarros, esguinces, contusiones y tendinitis. El calor se debe aplicar en casos de contracturas, espasmos musculares o rigidez en articulaciones.

Materialidad

Compuesta por un textil 100% Poliéster cuyo recubrimiento interno con PVC le otorga impermeabilidad, pudiendo contener tanto agua como hielo sin riesgo de derrame.

Tabla de talles / Código de barras

UNIVERSAL

7798094540030

Instrucciones de uso

Calor:

1. Calentar agua hasta alcanzar la temperatura deseada.
2. Retirar la tapa de la bolsa e introducir el agua caliente.
3. Cerrar bien la tapa y luego aplicar sobre la zona afectada.

Frío:

1. Retirar la tapa de la bolsa e introducir el hielo.
2. Cerrar bien la tapa y luego aplicar sobre la zona afectada.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Deben controlarse los tiempos de aplicación para impedir congelamiento o quemaduras producidas por el exceso de frío o calor: el tiempo de aplicación, tanto para frío como para calor, debe oscilar entre 15 y 30 minutos.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- \* Traumatismos.
- \* Tensiones musculares.
- \* Dolores artríticos.
- \* Contracturas.
- \* Desgarros.
- \* Espasmos musculares.
- \* Luxaciones.
- \* Tendinitis.
- \* Contusiones.
- \* Retracciones musculares.
- \* Dolores de cabeza.

Composición

Interior: Policloruro de vinilo 100%  
Exterior: Poliéster 100%.

Productos relacionados

1313 - 1325 - 2425 - PG

Envase	Estuche
Cantidad	1 unidad
Color	Celeste
NCM	6113.00.00
Peso sin envase	125g / 0,125 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	China

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:

Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:

Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:

www.ptm.global - info@ptm.global

ficha\_de\_producto\_BH\_v.1

PTM