



Nombre

## Corrector de postura universal regulable

Adjustable universal back-posture correcto

Código externo

02.03.307

Código interno

15.307

Descripción

Brinda corrección postural progresiva, ayudando a prevenir y tratar dolencias asociadas a la columna vertebral y los músculos de la espalda. Una mala postura puede derivar en graves trastornos físicos en diferentes partes del cuerpo, que a mediano y largo pueden pronunciarse. Está compuesto por dos tiras regulables que sostienen a los hombros y espalda, permitiendo ajustar la posición deseada durante su uso. También posee una regulación en la espalda, la cual permite que el corrector se adapte de manera confortable a a distintas anatomías.

Modo de acción

La tensión que se aplica al ajustar el producto genera que los hombros se desplacen hacia atrás; reubicando la columna en la postura adecuada. El material acolchado evita que la fuerza que aplica el producto se concentre únicamente en las axilas, distribuyendo las mismas por los hombros y espalda, maximizando el confort. Permite regularse las veces que el usuario lo desee, fácilmente y en uso.

Materialidad

Elaborado a partir de bondeado compuesto por poliuretano, poliéster y jersey algodón, con terminaciones en lycra para el máximo confort al usarlo. Posee dos tiras laterales y una central, todas regulables para lograr la máxima adaptación a las distintas posiciones.

Tabla de talles / Código de barras

<b>U</b>	Universal	7798094541631
----------	-----------	---------------

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Pasar los brazos a través de ambas tiras de manera tal, que la unión donde se encuentra el logo de WELLBRACE quede centrado en la parte alta de la espalda.
2. Desprender los abrojos de las tiras y colocar los hombros en la posición deseada.
3. Estirar y apoyar los extremos de ambas tiras, hasta prender los abrojos. Para corregir el ajuste, desabrochar y repetir este paso.
4. Para regular en altura, despegar el abrojo de la tira central en la espalda y ubicarla a la altura necesaria para lograr una postura onfortable.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Para pieles sensibles utilizar una prenda de algodón debajo del espalda.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- \* Dolor cervical, torácico y/o lumbar
- \* Lumbalgias
- \* Protusiones discales
- \* Mialgias
- \* Cifosis
- \* Dorsalgías
- \* Hernias de disco

Composición

Espuma de poliuretano 36% Poliamida 32% Algodón 32%

Productos relacionados

L1 - E1 - 305 - 306

Envase	Caja
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6212.90.00.000A
Peso sin envase	66 g / 0,066 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global