



Nombre

## Bota anti rotación

Anti rotation boot

Código externo

03.01.6700

Código interno

25.6700

Descripción

Limita la rotación del pie mediante dos piezas: un soporte rígido de plástico y una funda de tela acolchada. El soporte puede regularse para mover el pie en mayor o menor medida, siendo la rotación, interna o externa, graduable hasta 20°. En la parte interna del soporte, donde se apoya el talón, se ubica una almohadilla para impedir la aparición de úlceras y escaras. El producto puede ser utilizado en ambos pies.

Modo de acción

En post-operatorios de cadera, pierna, rodilla, tobillo o pie es necesario que el pie no rote, ciertos movimientos de tendones o músculos pueden disminuir el efecto positivo de la operación realizada. El soporte rígido estabiliza el pie y limita los movimientos de rotación mediante una inmovilización al giro total, o parcial de hasta 20° del pie. La funda acolchada brinda calor terapéutico acelerando el proceso de recuperación y evita la formación de escaras por contacto.

Materialidad

Elaborada a partir de un tejido sintético compuesto por poliéster y acrílico. Su cara interna afelpada protege a la zona de posibles golpes y aporta calor terapéutico. El soporte esta compuesto de poliestireno de alto impacto, material resistente y ligero.

Tabla de talles / Código de barras

**UNIVERSAL** 7798094549439

Instrucciones de uso

1. Fijar la bota en el ángulo de rotación sugerido por el médico.
2. Desabrochar los abrojos.
3. Colocar el pie dentro del producto y ajustar los abrojos.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Bota de piel: Poliéster 95% Acrílico 5%  
Soporte plástico: Poliestireno de alto impacto 100%

Patologías

- \* Profilaxis de úlceras por presión
- \* Prevención del pie equino
- \* Profilaxis de sub-luxación o luxación de cadera post quirúrgica.
- \* Pie diabético
- \* Arteriopatía periférica
- \* Lesiones articulares

Productos relacionados

6100 - 6110 - 6300 - 6500

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Blanco
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global