



Nombre

Pad Metatarsal

Metatarsal Pad

Código externo

20.08.PM

Código interno

82.PM

Descripción

Brinda alivio y protección para inflamaciones e irritaciones producidas por los roces y presiones del calzado en la zona del metatarso. Indicado para el tratamiento de metatarsalgia, hiperqueratosis de las cabezas metatarsales, disminución del panículo adiposo y artritis reumatoide. Su anillo sujetador permite mantener el producto en su lugar a lo largo del día.

Modo de acción

El pad se mantiene en la posición deseada, gracias al anillo que rodea al segundo dedo del pie. La consistencia del gel de silicona previene el roce de la piel con el calzado y proporciona una distribución uniforme de la presión para una mayor comodidad a lo largo del día.

Materialidad

Elaborados íntegramente en gel de silicona de grado médico, un material hipoalergénico, no tóxico, no inflamable y sin olor, que favorece la cicatrización.

Tabla de tallas / Código de barras

UNIVERSAL	7798162420257
------------------	---------------

Instrucciones de uso

1. Colocar el anillo sujetador en el segundo dedo del pie.
2. Acomodar el pad bajo la zona del metatarso hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Quitar el producto si siente entumecimiento, hormigueo o la extremidad fría o pálida. No es aconsejable su uso para personas con diabetes o mala circulación. Preferentemente usar bajo sugerencia médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar. Secar con toalla para quitar el exceso de agua. Aplicar fécula. Almacenar en lugar protegido de la humedad.



Patologías

- * Hiperqueratosis de las cabezas metatarsales
- * Queratosis
- * Ampollas
- * Flictenas
- * Irritaciones cutáneas
- * Disminución del panículo adiposo
- * Metatarsalgia
- * Artritis reumatoide

Envase	Blister plástico
Cantidad	1 par
Color	Blanco
NCM	3926.90.90
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	China

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Composición

100% Gel de silicona

Productos relacionados

PC-TC-TEA-TER-PS-PCH-PGL-OS-PD-PT-TM-AD-SA-KP-DP-TA-AI-AG-JU-STT-DG