



Nombre

Protector para Talón de Aquiles

Achilles Heel Protector

Descripción

Alivia y previene el dolor ocasionado por el roce entre el pie y el calzado, en la parte posterior el talón llamada talón de Aquiles, evitando la formación de ampollas e irritaciones. Su diseño se adapta a cualquier tipo de calzado.

Código externo

20.07.TA

82.TA

Modo de acción

La consistencia del gel permite que los protectores se adhieran al calzado, amortiguen y protejan al pie, evitando irritaciones en la zona del talón de Aquiles, producto del roce del calzado al caminar.

Materialidad

Elaborados en gel de poliuretano, elastómero de gran elasticidad, capacidad de amortiguación y aislación térmica.

Tabla de talles / Código de barras

UNIVERSAL

7798162420189

Instrucciones de uso

El protector debe adherirse al calzado, no a la piel.

- 1. Retirar el producto a utilizar de la película protectora.
- 2. Colocar el protector en la parte posterior del calzado, en la zona del talón de
- 3. Presionar hasta que quede correctamente adherido.

Advertencias y Recomendaciones

* Irritaciones cutáneas del pie

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Producto no estéril, no utilizar directamente sobre heridas abiertas o zonas infectadas.

Envase	Blister plástico
Cantidad	1 par
Color	Transparente
NCM	3926.90.90
Peso sin envase	

Peso con envase

Volumen con envase

Industria/Origen

China

Producto distribuído por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico: Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA -

Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor: www.ptm.global - infoゐptm.global Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar. Secar con toalla para quitar el exceso de agua. Almacenar en lugar protegido de la humedad. Matener alejado de oxidantes y ácidos.















Productos relacionados

Patologías

* Callosidades

* Laceraciones

PC-TC-TEA-TER-PS-PCH-PGL-OS-PD-PT-TM-AD-SA-KP-DP-AG-AI-DG-JU-PM-STT



100% Gel de poliuretano