



Nombre

Anillos de Gel

Gel Rings

Código externo

20.08.AG

Código interno

82.AG

Descripción

Brindan alivio y protección para inflamaciones e irritaciones, producidas por los roces y presiones con el calzado en la zona de los dedos. Indicados para el tratamiento y prevención de callosidades, quemaduras, dedo de martillo y estados pre-ulcerosos, ayudando en la aceleración de los procesos de recuperación. Su diseño anatómico permite colocarlos de manera localizada a lo largo de los dedos de la mano o del pie según se requiera.

Modo de acción

La consistencia del gel de silicona previene el roce de la piel con el calzado y proporciona una distribución uniforme de la presión para una mayor comodidad a lo largo del día.

Materialidad

Elaborados íntegramente en gel de silicona de grado médico, un material hipoalergénico, no tóxico, no inflamable y sin olor, que favorece la cicatrización.

Tabla de tallas / Código de barras

Según tamaño de dedo

S	7798162420264
M	7798162420424
L	7798162420431

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Colocar en el dedo según se requiera.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Quitar el producto si siente entumecimiento, hormigueo o la extremidad fría o pálida. No es aconsejable su uso para personas con diabetes o mala circulación. Preferentemente usar bajo sugerencia médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar. Secar con toalla para quitar el exceso de agua. Aplicar fécula. Almacenar en lugar protegido de la humedad.

Patologías

- * Helomas interdigitales
- * Queratosis
- * Ampollas
- * Flictenas
- * Irritaciones cutáneas
- * Laceraciones
- * Callosidades



Envase	Blister plástico
Cantidad	1 par
Color	Transparente
NCM	3926.90.90
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	China

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Composición

100% Gel de silicona

Productos relacionados

PC-TC-TEA-TER-PS-PCH-PGL-OS-PD-PT-TM-AD-SA-KP-DP-TA-AI-DG-JU-PM-STT