



Nombre

Cabestrillo de red

Mesh arm sling

Código externo

01.04.502

Código interno

25.502

Descripción

Brinda sujeción firme al brazo y antebrazo, permitiendo de esta forma una mejor y más pronta recuperación. Diseñado para dolencias del hombro, fracturas y luxaciones del brazo, codo y antebrazo. De simple y rápida colocación, el cabestrillo cuenta con una tira regulable sobre el hombro que permite ajustar el producto a la altura deseada. El bucle interno funciona como soporte de dedo pulgar. Confeccionado a partir de tela de red, obteniendo así un producto liviano y respirable. Funciona también como sostén de yesos y férulas. Puede utilizarse en ambos brazos.

Modo de acción

El cabestrillo contiene y estabiliza la articulación del hombro, además de aliviar la descarga que se ejerce sobre el mismo, dejándolo en reposo para una correcta sanación. La sujeción del brazo resulta fundamental para la recuperación de traumatismos y patologías en muñeca, codo, antebrazo, brazo y hombro. Las tiras permiten ajustar la posición del cabestrillo según las necesidades del usuario.

Materialidad

Elaborado con un tejido de red 100% poliéster. Sus características de bajo peso, gran resistencia a la tensión y respirabilidad brindan sujeción, evitando una sudoración excesiva.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de pecho

XS	56 - 70 cm.	7798094540078
S	70 - 85 cm.	7798094547770
M	85 - 106 cm.	7798094547787
L	106 - 127 cm.	7798094547794

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar el broche plástico que une la tira del hombro con el cabestrillo.
2. Introducir el brazo a través del cabestrillo, pasando la mano por el orificio. El lado largo del cabestrillo debe sostener el antebrazo.
3. Regular el largo de la tira mediante el pasador en el extremo del broche plástico.
4. Pasar la tira por encima del hombro rodeando el cuello hasta abrochar el broche plástico.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Envase	Caja de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Blanco
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	35 g / 0,35 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Poliéster 100%

Patologías

- * Luxaciones de brazo, codo, muñeca y antebrazo
- * Traumatismos de hombro
- * Subluxaciones de la articulación escápulo humeral
- * Fracturas de brazo, codo, muñeca y antebrazo

Productos relacionados

501 - 501N - 503 - 1216 - 504