



Nombre

## Chaleco inmovilizador de hombro

Shoulder immobilizer vest

Código externo

01.04.504

Código interno

25.504

Descripción

Diseñado para inmovilizar el hombro y brazo, permitiendo una correcta y pronta recuperación. Brinda calor terapéutico. Mantiene el hombro estabilizado, y el antebrazo y codo cerca del tronco, impidiendo que estos se muevan lateralmente. Elaborado a partir de un textil reversible que permite una libre posición de los abrojos, asegurando una correcta inmovilización para cualquiera de los brazos. Recomendado para lesiones en la zona de la cintura escapular que requieren inmovilización y contención. Para uso terapéutico, en recuperación y tratamiento.

Modo de acción

El objetivo terapéutico es la inmovilización del hombro en abducción, rotación y antepulsión. Su uso está indicado para aquellas lesiones que requieran un reposo absoluto de la articulación glenohumeral. Contiene y estabiliza la articulación escapulo humeral, además de permitir la descarga de la articulación del hombro, dejándolo en reposo para una correcta sanación y distribuyendo el peso del brazo con el fin de evitar la sobrecarga de la zona cervical. La sujeción del brazo resulta fundamental para la recuperación de traumatismos y dolencias de codo, antebrazo, brazo y hombro.

Materialidad

Elaborado a partir de goma espuma bondeada con velour de poliamida en ambos lados, lo que da como resultado un producto reversible y adaptable a las necesidades y fisonomías de cada usuario. El velour de poliamida cumple la función de sujeción del abrojo, permitiendo regular el ajuste del producto. La goma espuma interna está compuesta por poliéster, su espesor es de 7 milímetros, la cual protege la articulación de posibles golpes.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de pecho

S	71 - 85 cm.	7798094540511
M	86 - 106 cm.	7798094540528
L	107 - 122 cm.	7798094540535
XL	123 - 135 cm.	7798094540542

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Caja de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	35 g / 0,35 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	12177cm <sup>3</sup> / 0.012177m <sup>3</sup>
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

\*Ver anexo ilustrativo.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Interior: Poliuretano 100%  
Exterior: Poliamida 100%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- \* Rotura de tendones.
- \* Rotura de ligamentos.
- \* Fractura de clavícula.
- \* Fracturas de brazo, codo, antebrazo y hombro.
- \* Fracturas subcapitales de húmero.
- \* Luxaciones de brazo, codo, antebrazo y hombro.
- \* Luxaciones acromioclaviculares.
- \* Subluxaciones de la articulación escapulo humeral.
- \* Traumatismos de hombro y brazo.

Productos relacionados


501 - 501N - 502 - 503 - 1216

# Chaleco inmovilizador de hombro


## Instrucciones de Uso

Se sugiere que en la primera colocación, el usuario sea asistido por un especialista o un acompañante, para evitar posibles incomodidades.


El producto se encuentra presentado para ser utilizado en el brazo derecho. Para su uso en el brazo izquierdo, dar vuelta el producto (del interior hacia el exterior).

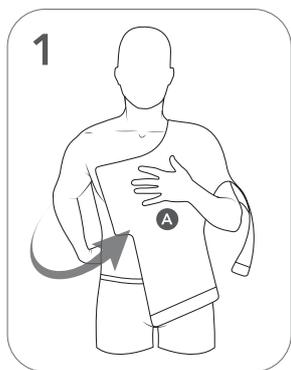


1 Posicionar sobre el hombro a tratar, con la parte **A** sobre el pecho. Ubicar la costura de unión (frente y espalda) sobre la línea de hombro.

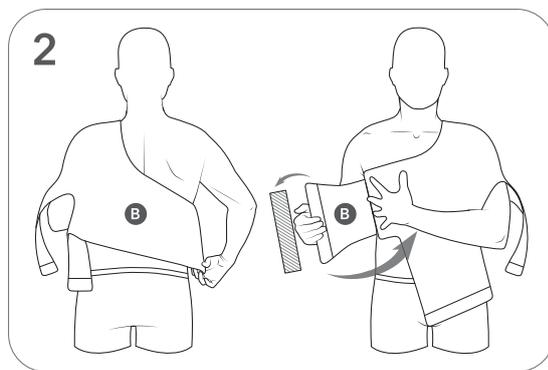


2 Tomar la parte **B** y llevarla hacia adelante, por debajo del brazo libre. Luego desabrochar el abrojo tipo felpa interno y pegar sobre la parte **A**.

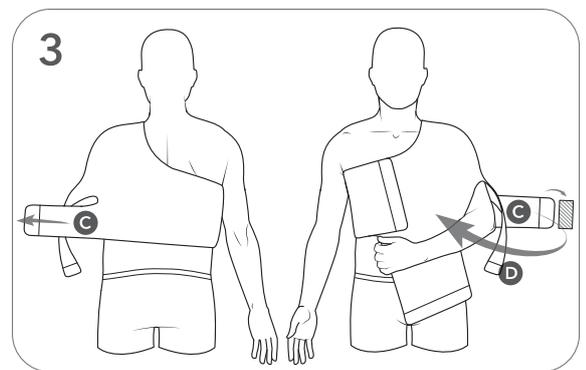

3 Tomar la parte **C**, y pasar por sobre la pieza **D** y el brazo a inmovilizar, manteniéndolo cerca del cuerpo. Desabrochar el abrojo tipo felpa interno y pegar sobre el pecho.

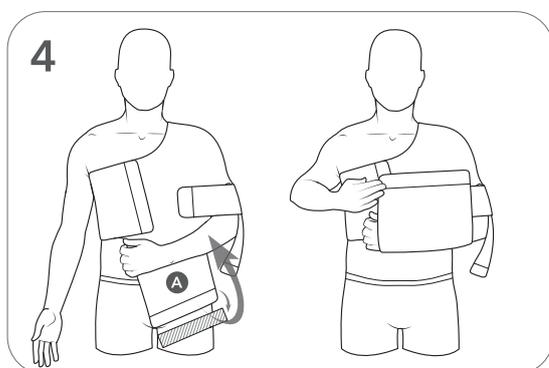

4 Retirar el abrojo tipo felpa interno de la parte **A**. Flexionar el brazo a inmovilizar a 90° y plegar sobre si misma la pieza **A**, envolviendo el antebrazo.

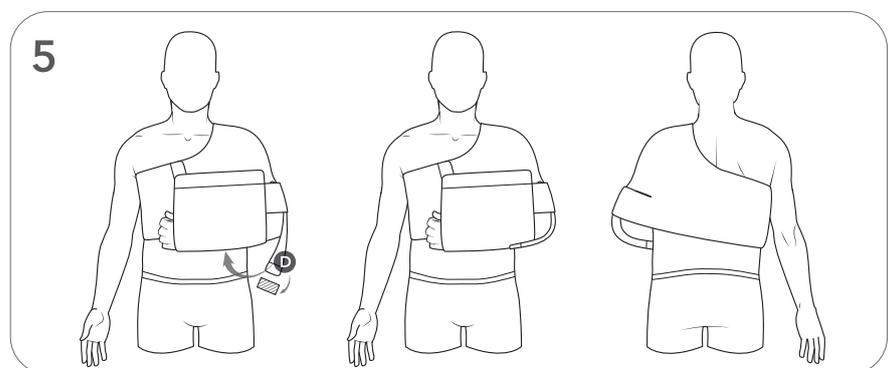

5 Desabrochar el abrojo tipo felpa interno de la pieza **D**. Pasarla por debajo del codo y abrochar en la parte inferior del antebrazo.