



Nombre

### Codera de tenista/golfista

Tennis/Golf elbow support

Código externo

01.03.C4

Código interno

16.C4

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones leves, como epicondilitis - codo de tenista - y epitrocelitis - codo de golfista-, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva. La banda de ajuste con abrojo, permite una correcta sujeción y regulación del producto. Incluye un pad que puede adherirse al interior del producto, para brindar mayor compresión en un área localizada. Puede ser utilizada en ambos codos.

Modo de acción

Mediante la estabilización del codo, aplicando compresión moderada, se logra el alivio de distensiones, esguinces y demás lesiones. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración. La banda de ajuste aporta fuerzas adicionales, para proteger el tejido que recubre los músculos y limitar la progresión de la lesión.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3,5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislamiento térmico, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es cómodo al contacto con la piel y contribuye a la contención del calor.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de codo.

S	22 - 24 cm.	7798094545899
M	25 - 28 cm.	7798094545905
L	29 - 32 cm.	7798094545912

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar el abrojo.
2. Introducir el brazo a través de la codera, hasta que la misma quede colocada en el antebrazo, próxima al codo.
3. Colocar el pad de compresión donde se requiera, según tratamiento.
4. Ajustar el abrojo, con los músculos del antebrazo relajados.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	25 g / 0,025 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No planchar. No usar lavandina. No retorcer. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No exponer al sol o altas temperaturas. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos.



Patologías

- \* Epicondilitis - Codo de tenista-
- \* Epitrocelitis - Codo de golfista-
- \* Bursitis
- \* Artritis
- \* Lesiones inflamatorias
- \* Esguinces leves
- \* Inestabilidad articular
- \* Tendinitis

Composición

Interior: Policloropreno 100%,  
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

C1 - C2

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:  
www.ptm.global - info@ptm.global