

# PROFIT

## ACTIVÁ TUS DÍAS



Nombre

**Codera**  
**Elbow Support**

Código externo

01.03.C1

Código interno

16.C1

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Puede ser utilizada en ambos codos.

Modo de acción

Mediante la estabilización del codo, aplicando compresión moderada, se logra el alivio de distensiones, esguinces y demás lesiones. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3.5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es confortable al contacto con la piel y contribuye a la contención del calor.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de codo

S	22 - 24 cm.	7798094545806
M	25 - 28 cm.	7798094545813
L	29 - 32 cm.	7798094545820

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Introducir el brazo a través de la codera. El codo debe ubicarse en la parte media de la codera, con la costura de lado interno y el logo en la parte superior.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- \* Bursitis
- \* Lesiones inflamatorias
- \* Esguinces leves
- \* Inestabilidad articular
- \* Tendinitis
- \* Epicondilitis -codo de tenista-
- \* Epitrocelitis -codo de golfista-

Composición

Interior: Policloropreno 100%  
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

C2 - C4

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global

ficha\_de\_producto\_C1\_v.1

PTM