



Nombre

Dedales de Gel

Gel Toe Caps

Código externo

20.08.DG

Código interno

82.DG

Descripción

Brindan alivio y protección para inflamaciones e irritaciones, producidas por los roces y presiones con el calzado en la zona de los dedos. Indicados para el tratamiento y prevención de callosidades, quemaduras, dedo de martillo y estados pre-ulcerosos, ayudando en la aceleración de los procesos de recuperación. Puede utilizarse en los dedos de la mano o del pie según se requiera.

Modo de acción

La consistencia del gel de silicona previene el roce de la piel con el calzado y proporciona una distribución uniforme de la presión para una mayor comodidad a lo largo del día.

Materialidad

Elaborados íntegramente en gel de silicona de grado médico, un material hipoalergénico, no tóxico, no inflamable y sin olor, que favorece la cicatrización.

Tabla de tallas / Código de barras

Según tamaño de dedo

S	7798162420271
M	7798162420295
L	7798162420301

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

- Colocar cubriendo el dedo según se requiera.
- Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Quitar el producto si siente entumecimiento, hormigueo o la extremidad fría o pálida. No es aconsejable su uso para personas con diabetes o mala circulación. Preferentemente usar bajo sugerencia médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar. Secar con toalla para quitar el exceso de agua. Aplicar fécula. Almacenar en lugar protegido de la humedad.



Patologías

- * Helomas interdigitales
- * Queratosis
- * Quemaduras
- * Flictenas
- * Irritaciones cutáneas
- * Laceraciones
- * Callosidades
- * Estados pre-ulcerosos
- * Dedo de martillo

Composición

100% Gel de silicona

Productos relacionados

PC-TC-TEA-TER-PS-PCH-PGL-OS-PD-PT-TM-AD-SA-KP-DP-TA-AI-AG-JU-PM-STT

Envase	Blister plástico
Cantidad	1 par
Color	Blanco
NCM	3926.90.90
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	China

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global