



Nombre

Faja Flexband 3 bandas regulable

Adjustable 3 Flexband support

Código externo

02.05.3300

Código interno

01.3300

Descripción

Brinda soporte moderado a la zona media y baja del tronco. Indicada para el tratamiento de dolencias y traumatismos asociados al área torácica y abdominal. Fabricada con elástico de mediana compresión y alta elasticidad, su función principal es prestar soporte y compresión. El diseño con bandas permite flexionar y extender el tronco, facilitando el movimiento del usuario. Su sistema de cierre permite regular la compresión acorde al tratamiento indicado.

Modo de acción

La faja brinda fuerzas de compresión, las cuales proveen contención al abdomen y a la parte baja de la espalda, colaborando con una pronta recuperación. Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos. Las bandas impiden que la compresión localizada se desplace por la flexión o extensión del tronco.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico de trama cerrada, que brinda compresión moderada, con zona de puntos sin tejer para lograr el diseño de bandas. Compuesto por algodón -fibra natural, hipoalérgica-, elastodieno y poliéster.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de cintura

Talle	Medida	Código de barras
S	63 - 75 cm.	7798094541198
M	75 - 87 cm.	7798094541204
L	87 - 99 cm.	7798094541211
XL	99 - 111 cm.	7798094541228
XXL	111 - 123 cm.	7798094547831

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar el abrojo.
2. Colocar la faja alrededor del abdomen. El logo Wellbrace debe quedar visible desde el frente y en la parte superior de la faja.
3. Ajustar el abrojo y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Algodón 50% Elastodieno 30% Poliéster 20%

Patologías

- * Dolores costales
- * Traumatismos leves
- * Fisura de costillas
- * Desgarro muscular
- * Contusiones
- * Eventraciones
- * Hipotonía de la musculatura abdominal
- * Hipertonía muscular posterior
- * Dismetrías
- * Dolor lumbar referido

Productos relacionados

2024 - 2400R/2800R/3200R - 2800T - 3400

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Blanco
NCM	6212.20.00
Peso sin envase	90 g. / 0.09 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global