



Nombre

## Faja sacrolumbar súper cómoda

Comfortable lumbo-sacral support

Código externo

02.07.635

Código interno

03.635

Descripción

Brinda soporte firme y compresión a la zona baja del tronco. Indicada para el tratamiento de dolencias y traumatismos asociados al área torácica y abdominal. Confeccionada con elásticos de alta compresión y elasticidad. El refuerzo de tela bondeada con espuma en la zona lumbar, proporciona mayor confort durante el uso. Cuenta con cinco ballenas flexibles en la parte posterior y dos ballenas laterales, que ayudan a una mejor postura, y bandas de ajuste laterales que permiten una mayor regulación. Su sistema de cierre permite regular la compresión acorde al tratamiento indicado.

Modo de acción

Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos. El sistema de bandas de ajuste laterales permite una doble compresión, regulable según los requerimientos de cada tratamiento. Las ballenas plásticas flexibles colaboran con el soporte y limitan moderadamente la flexo-extensión de la zona, favoreciendo una rápida recuperación.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico de trama cerrada, que brinda compresión firme, respirabilidad a la piel, y es agradable al tacto; compuesto por poliéster y elastodieno. En la zona posterior tiene un refuerzo de tela, compuesta por algodón, poliéster, bondeada con espuma de poliuretano.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de cintura

Talle	Medida	Código de barras
<b>S</b>	63 - 75 cm.	7798094540870
<b>M</b>	75 - 87 cm.	7798094540887
<b>L</b>	87 - 99 cm.	7798094540894
<b>XL</b>	99 - 111 cm.	7798094540900
<b>XXL</b>	111 - 123 cm.	7798094540917

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Colocar la faja alrededor del abdomen, con los elásticos hacia los laterales. El logo Wellbrace debe quedar visible desde el frente y en la parte superior de la faja.
3. Ajustar el abrojo principal, luego las bandas de ajuste laterales para una doble compresión.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Poliéster 70% Elastodieno 30%

Patologías

- \* Espondilolisis
- \* Espondiloartrosis
- \* Lumbalgias
- \* Lumbociatalgias
- \* Sacroileítis
- \* Hipertonía muscular posterior

Productos relacionados

610 - 611 - 600 - 615 - 620 - 630 - 640 - 660 - 670

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Beige
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	205 g. / 0.205 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global