



Nombre

Faja Sacrolumbar ADVANCE

ADVANCE Lumbo-sacral support

Código externo

02.07.FW1

Código interno

03.FW1

Descripción

Brinda contención semi firme a la zona sacrolumbar, permitiendo realizar movimientos con mayor flexibilidad y confort. Desarrollada con tejido respirable en la zona lumbar, que contribuye a mantener la piel seca. Indicada para el tratamiento de dolencias y traumatismos asociados al área torácica y abdominal. Cuenta con cinco ballenas flexibles en la parte posterior, que ayudan a mejorar la postura, y bandas de ajuste laterales desde la columna hasta el abdomen, que permiten una mayor regulación. Su sistema de cierre permite regular la compresión acorde al tratamiento indicado.

Modo de acción

Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos. El sistema de bandas de ajuste laterales permite una doble compresión, regulable según los requerimientos de cada tratamiento. Las ballenas plásticas flexibles colaboran con el soporte y limitan moderadamente la flexo-extensión de la zona, favoreciendo una rápida recuperación.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico de trama cerrada, que brinda compresión firme y es agradable al tacto; compuesto por poliamida y elastodieno. La zona posterior de la faja está realizada con spandex y poliamida, que brindan elasticidad y suavidad al producto. El spandex es un material de secado rápido, resistente a la sudoración, que no genera electricidad estática y cuenta con un alto grado de recuperación elástica. La poliamida, posee un excelente cuadro de propiedades mecánicas, tenacidad elevada y características de deslizamiento y resistencia al desgaste superiores. Este material también se destaca por su alto grado de absorción y evaporación de la humedad.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de cintura

S	63 - 75 cm.	7798094541570
M	75 - 87 cm.	7798094541587
L	87 - 99 cm.	7798094541594
XL	99 - 111 cm.	7798094541600
XXL	111 - 123 cm.	7798094541617

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Gris
NCM	
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Colocar la faja alrededor del abdomen, con los elásticos hacia los laterales. La línea blanca debe quedar en la parte superior, y la violeta en el borde inferior de la faja.
3. Ajustar el abrojo principal, luego las bandas de ajuste laterales para una doble compresión.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Espondilolisis
- * Espondiloartrosis
- * Lumbalgias
- * Lumbociatalgias
- * Sacroileítis

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Composición

Poliamida 84%, Goma 11%, Elastano 4%, Poliéster 1%.

Productos relacionados

610 - 611 - 600 - 615 - 620 - 630 - 635 - 640 - 660 - 670