



Nombre

Descripción

Faja Softy Plus regulable

Adjustable Softy Plus support

1205-2400R/U

Código externo

P111W2400R/U

Modo de acción

Brinda soporte suave a la zona media y baja del tronco. Indicada para el tratamiento de dolencias asociadas al área torácica y abdominal, en caso de post-operatorios de cirugía abdominal, dolores lumbares, fisuras costales y post-partos por cesárea. Fabricada con elástico de suave compresión y alta elasticidad. Su sistema de cierre permite regular la compresión acorde al tratamiento indicado.

La faja brinda fuerzas de compresión, las cuales proveen contención al abdomen y a la parte baja de la espalda. Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico de trama abierta, que brinda compresión suave, respirabilidad a la piel, y es agradable al tacto; compuesto por algodón -fibra natural, hipoalergénica-, elastodieno y poliéster. La cara interna, que permanece en constante contacto con la piel, es de algodón.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de cintura

S	63 - 75 cm.	7798094540160
M	75 - 87 cm.	7798094540177
L	87 - 99 cm.	7798094540184
XL	99 - 111 cm.	7798094540191
XXL	111 - 123 cm.	7798094540207
U beige	65 - 105 cm.	7798094541648
U gris	65 - 105 cm.	7798094541709

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla

Envase	Estuche de cartón	
Cantidad	1 unidad	
Color	- Beige - Gris	
NCM	6212.20.00	
Peso sin envase		78 g
Peso con envase		124 g
Volumen con envase		0.0016 m3
Industria/Origen		Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:

Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:

Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA -Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor: www.ptm.global - info@ptm.global Instrucciones de uso

- 1. Desabrochar el abrojo.
- 2. Colocar la faja alrededor del abdomen. El logo Wellbrace debe quedar visible desde el frente y en la parte superior de la faja.
- 3. Ajustar el abrojo y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.















- * Dolores costales
- * Traumatismos leves
- * Fisura de costillas
- * Desagarro muscular
- * Contusiones
- * Eventraciones
- * Hipotonía de la musculatura abdominal
- * Hipertonía muscular posterior
- * Dismetrías
- * Dolor lumbar referido

2024/2028 - 2800R/3200R - 2800T -3300/3400



Acrílico 46% Algodón 32%

Elastodieno 15% Poliéster 7%





Nombre

Faja Softy Plus regulable

Adjustable Softy Plus support

Código externo 1205-2800R/U

P111W2800R/U

Descripción

Brinda soporte suave a la zona media y baja del tronco. Indicada para el tratamiento de dolencias asociadas al área torácica y abdominal, en caso de post-operatorios de cirugía abdominal, dolores lumbares, fisuras costales y post-partos por cesárea. Fabricada con elástico de suave compresión y alta elasticidad. Su sistema de cierre permite regular la compresión acorde al tratamiento indicado.

Modo de acción

La faja brinda fuerzas de compresión, las cuales proveen contención al abdomen y a la parte baja de la espalda. Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico de trama abierta, que brinda compresión suave, respirabilidad a la piel, y es agradable al tacto; compuesto por algodón -fibra natural, hipoalergénica-, elastodieno y poliéster. La cara interna, que permanece en constante contacto con la piel, es de algodón.

Tabla de talles / Código de barras

Según	contorno	de	cintura
-------	----------	----	---------

S	63 - 75 cm.	7798094540269
M	75 - 87 cm.	7798094540276
L	87 - 99 cm.	7798094540283
XL	99 - 111 cm.	7798094540290
XXL	111 - 123 cm.	7798094540306
U beige	65 - 105 cm.	7798094541655
\boldsymbol{U} gris	65 - 105 cm.	7798094541716

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Estuche de cartón	
Cantidad	1 unidad	
Color	- Beige - Gris	
NCM	6212.20.00	
Peso sin envase		128 g
Peso con envase		169 g
Volumen con envase		0.0013 m3
Industria/Origen		Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico: Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección: Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA -Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor: www.ptm.global - infoāptm.global Instrucciones de uso

- 1. Desabrochar el abrojo.
- 2. Colocar la faja alrededor del abdomen. El logo Wellbrace debe quedar visible desde el frente y en la parte superior de la faja.
- 3. Ajustar el abrojo y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.















- * Dolores costales
- * Traumatismos leves
- * Fisura de costillas
- * Desagarro muscular
- * Contusiones
- * Eventraciones
- * Hipotonía de la musculatura abdominal
- * Hipertonía muscular posterior
- * Dismetrías
- * Dolor lumbar referido

2024/2028 - 2400R/3200R - 2800T -3300/3400



Acrílico 46% Algodón 32%

Elastodieno 15% Poliéster 7%