



Nombre

Faja torácica masculina
Male thoracic support

Código externo

02.04.610

Código interno

03.610

Descripción

Brinda soporte firme a la zona media y alta del tronco. Indicada para el tratamiento de dolencias y traumatismos asociados al área torácica y abdominal. Fabricada con elásticos de alta compresión y alta elasticidad, su función principal es prestar soporte y compresión. Su diseño estrecho permite colocar la faja cómodamente en cualquier parte del tórax de manera localizada. Su sistema de cierre permite regular la compresión acorde al tratamiento indicado.

Modo de acción

La faja brinda fuerzas de compresión, las cuales proveen contención al tórax. Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico de trama cerrada, que brinda compresión firme, respirabilidad de la piel, y es agradable al tacto; compuesta por poliéster y elastodieno.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de cintura

S	63 - 75 cm.	7798094540627
M	75 - 87 cm.	7798094540634
L	87 - 99 cm.	7798094540641
XL	99 - 111 cm.	7798094540658
XXL	111 - 123 cm.	7798094540665

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar el abrojo.
2. Colocar la faja alrededor del tórax. El logo Wellbrace debe quedar visible desde el frente y en la parte superior de la faja.
3. Ajustar el abrojo y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado el abrojo. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Dolores costales
- * Traumatismos leves
- * Fracturas de costillas
- * Desagarro muscular
- * Contusiones en la caja torácica

Composición

Poliéster 70% Elastodieno 30%

Productos relacionados

600 - 611 - 615 - 620 - 630 - 635 - 640 - 660 - 670

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Beige
NCM	6212.20.00
Peso sin envase	160 g. / 0.16 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global