



Nombre

Inmovilizador de muñeca largo

Long Wrist Splint

Código externo

01.01.M8

Código interno

16.M8

Descripción

Brinda soporte rígido a la muñeca, favoreciendo la recuperación de traumatismos, post-operatorios y post-fracturas. La inmovilización de la muñeca permite una rápida desinflamación del tendón medio, a través de dos ballenas rígidas y anatómicas de aluminio que se adaptan a la posición natural de la articulación. Su sistema de cierre con abrojos permite ajustar el producto acorde al tratamiento indicado. Puede utilizarse en ambas manos, con solo cambiar la ballena palmar de lado.

Modo de acción

El inmovilizador cuenta con dos ballenas rígidas que abarcan desde la parte media del antebrazo hasta la parte media de los metacarpianos, evitando movimientos de flexión o extensión de la articulación. El alivio de distensiones, inflamaciones, esguinces y traumatismos de muñeca se logra mediante la estabilización de la articulación radiocarpiana. Las fuerzas aplicadas por el producto mantienen la articulación en una posición neutra. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Elaborada en neoprene de 3mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en ambas caras. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. su revestimiento ofrece control de elasticidad y una suave textura.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de muñeca

S	13 -16 cm.	7798128673499
M	16 - 18 cm.	7798128673505
L	18 - 20 cm.	7798128673512

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talla diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. El producto se presenta para su uso en la mano derecha. En caso de utilizarse en la mano izquierda, cambiar las ballenas de bolsillo dejando la curva cóncava del lado interno de la mano.
3. Colocar el lado curvo de la ballena contra la palma de la mano. Tener en cuenta que el dedo pulgar debe quedar entre la tira ancha central y la tira angosta superior.
4. Tomar las tiras anchas y abrocharlas, traspasando los pasadores.
5. Ajustar la tira angosta superior por la parte media de la mano. Pegar primero el gancho del reverso, luego pasar por la hebilla metálica hasta abrochar la tira.
6. Tomar la tira angosta central y rodear el antebrazo, pasando por la hebilla metálica inferior.
7. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Tendinitis del Túnel Carpiano
- * Traumatismos del carpo y metacarpo
- * Contusiones
- * Postcirugía óseo-tendinosa del carpo
- * Inflamación tendinosa
- * Inestabilidad residual
- * Artritis de muñeca
- * Esguinces de la articulación radiocarpiana
- * Tenosinovitis
- * Dolores reumáticos
- * Artrosis con o sin edema
- * Post-operatorios de cúbito distal
- * Esguinces severos
- * Fracturas sin dislocaciones
- * Distensiones
- * Post-operatorios de radio distal
- * Tendinitis
- * Secuelas dolorosas por inflamación en artrosis y artritis

Composición

Interior: Policloropleno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

M5 - M6 - M7 - 6000 - 6020 - 6021

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	180 g / 0,180 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global