



Nombre

Muñequera Boomerang con dedo

Wrist / Thumb Wrap

Código externo

01.01.M4

Código interno

16.M4

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. El ajuste regulable y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Su diseño abierto con abrojo permite una regulación acorde al tratamiento indicado. Puede utilizarse en ambas muñecas.

Modo de acción

La muñequera aplica fuerzas multidireccionales, que mantienen la articulación en una posición neutra. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones de la muñeca se logra mediante la estabilización de la articulación radio carpiana, aplicando compresión moderada sobre la zona.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3.5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es comfortable al contacto con la piel y contribuye a la contención del calor.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de muñeca

Talle	Medida	Código de barras
S	13 - 16 cm.	7798094546056
M	16 - 18 cm.	7798128672157
L	18 - 20 cm.	7798094546063

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar el abrojo.
2. Colocar la muñequera alrededor de la muñeca.
3. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado el abrojo. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Contusiones
- * Esguinces
- * Distensiones
- * Debilidad muscular
- * Dolores reumáticos
- * Tendinitis
- * Inflamación tendinosa
- * Artritis de muñeca

Composición

Interior: Policloropreno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

M2 - M3 - M4 - EM1 - MAS

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global