



Nombre

Muñequera boomerang con inmovilización del dedo pulgar

Boomerang wrist support with thumb splint

Código externo

01.01.M5

Código interno

16.M5

Descripción

Brinda sujeción y calor terapéutico. Indicada para el tratamiento de traumatismos de muñeca y dedo pulgar. La ballena inmoviliza la articulación y evita la flexo-extensión del pulgar, ayudando a una rápida desinflamación de la vaina del tendón y recuperación de traumatismos severos sobre el dedo. Su sistema de cierre con abrojos, permite ajustar el producto acorde al tratamiento indicado. Puede utilizarse en ambas manos.

Modo de acción

Abarca desde la parte proximal de la articulación de la muñeca hasta la parte media de los metacarpianos. El dedo pulgar se encuentra inmovilizado por una ballena de aluminio. Se puede adaptar a la necesidad del tratamiento regulando el ajuste de la banda que rodea la muñeca. El alivio en distensiones, inflamaciones, esguinces y demás traumatismos de la muñeca se logra mediante la estabilización de la articulación radiocarpiana. Brinda calor terapéutico promoviendo el aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3,5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es confortable al contacto con la piel y contribuye a la contención del calor.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de muñeca

S	13 -16 cm.	7798094546148
M	16 - 18 cm.	7798128672188
L	18 - 20 cm.	7798094546155

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Quitar la protección del abrojo interno.
2. Introducir el pulgar por el orificio de la muñequera. El logo Wellbrace debe quedar del lado de los dedos, en el dorso para la mano derecha, y en la palma para la mano izquierda.
3. Tomar el lado corto de la muñequera y rodear la muñeca hasta el punto máximo de extensión, abrochar el abrojo interior en la parte interna de plush.
4. Tomar el lado largo, rodeando la muñeca completamente y abrochar el abrojo.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Luxación del dedo pulgar
- * Tenosinovitis
- * Tenosinovitis de De Quervain
- * Artrosis
- * Síndrome del túnel carpiano
- * Esguinces severos
- * Rizartrrosis del pulgar
- * Distensiones
- * Contusiones
- * Debilidad muscular
- * Inflamación tendinosa
- * Dolores reumáticos
- * Artritis de muñeca
- * Tendinitis
- * Artritis metacarpofalángica del dedo pulgar

Composición

Interior: Policloroaplano 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

M6 - M7 - M8 - 6000 - 6020 - 6021

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	43 g. / 0.043 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global