



Nombre

Muñequera inmovilizadora

Wrist splint

Código externo

01.01.M6

Código interno

16.M6

Descripción

Brinda soporte rígido a la muñeca, favoreciendo la recuperación de traumatismos, post-operatorios y post-fracturas. La inmovilización de la muñeca permite una rápida desinflamación del tendón medio. Se ajusta a la muñeca del paciente mediante abrojos y puede utilizarse en ambas manos con solo cambiar la ballena palmar de lado.

Modo de acción

La muñequera cuenta con una ballena rígida que abarca desde la parte proximal de la muñeca hasta la parte media de los metacarpianos, la cual evita movimientos de flexión o extensión de la articulación. El alivio de distensiones, inflamaciones, esguinces y traumatismos de muñeca se logra mediante la estabilización de la articulación radiocarpiana. Las fuerzas multidireccionales aplicadas por el producto mantienen la articulación en una posición neutra. Se puede ajustar el producto según la necesidad del tratamiento regulando los abrojos. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3,5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es confortable al contacto con la piel y contribuye a la contención del calor.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de muñeca

S	13 - 16 cm.	7798094547954
M	16 - 18 cm.	7798128672195
L	18 - 20 cm.	7798094547961

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talla diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. El producto se presenta para ser utilizado en la mano derecha. Para utilizar en la mano izquierda, deberá cambiar la ballena al bolsillo contrario, dejando la curva cóncava del lado de plush, en la zona superior del bolsillo.
3. Colocar el lado de la ballena metálica de la muñequera contra la palma de la mano, teniendo en cuenta que el dedo pulgar debe quedar entre los tres abrojos inferiores y el abrojo superior.
4. Tomar el lado que contiene los abrojos y rodear la muñeca en forma completa hasta abrochar los mismos.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Tendinitis del Túnel Carpiano
- * Distensiones
- * Contusiones
- * Debilidad muscular
- * Inflamación tendinosa
- * Dolores reumáticos
- * Artritis de muñeca
- * Tendinitis
- * Tenosinovitis
- * Artrosis
- * Esguinces severos

Composición

Interior: Policloroelastano 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

M5 - M7 - M8 - 6000 - 6020 - 6021

Envase	Estuche de cartón	
Cantidad	1 unidad	
Color	Negro	
NCM	9021.10.10	
Peso sin envase	60 g. / 0.06 Kg.	
Peso con envase		
Volumen con envase		
Industria/Origen	Argentina	

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global