



Nombre

NEO NAT - Sostén maternal

NEO NAT - Maternity support

Código externo

02.06.315

Código interno

15.315

Descripción

Brinda soporte moderado a la zona baja del vientre, ayudando a contener el peso del mismo, y a equilibrar el centro de gravedad de la mujer embarazada. Fabricada con elástico de mediana compresión y alta elasticidad, su función principal es prestar soporte. El elástico doble en su parte frontal permite contener adecuadamente al vientre en su totalidad, adaptándose a la anatomía de la usuaria. Su sistema de cierre con abrojo permite regular la compresión. Previene la formación de estrías.

Modo de acción

La faja brinda fuerzas de compresión, las cuales proveen contención y soporte al abdomen en la parte baja del vientre, reduciendo la carga que se produce en la columna durante la gestación, aliviando dolores lumbares y ayudando a prevenir la formación de estrías. El material elástico permite que se adapte a la anatomía de cada usuario y al crecimiento de la panza durante el embarazo.

Materialidad

Elaborado a partir de un elástico compuesto por elastano y poliéster. Su cara interna cuenta con terminación afelpada conformando un producto acolchado, firme y de agradable textura.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de cintura

S	65 - 79 cm.	7798094541167
M	79 - 93 cm.	7798094541174
L	93 - 107 cm.	7798094541181

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talla diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar el abrojo.
2. Colocar la faja alrededor de la parte baja del vientre, con la doble banda hacia adelante.
3. Rodear la zona lumbar con el extremo más largo y ajustar el abrojo.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Lumbalgias
- * Eventraciones
- * Hiperlordosis

Composición

Poliéster 67% Elastodieno 33%

Productos relacionados

2024 - 2400R/2800R/3200R - 2800T - 3300/3400

Envase	Caja de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Blanco
NCM	6212.20.00
Peso sin envase	90 g. / 0.09 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global