



Nombre

Talonera confort gel

Confort gel heed pad

Descripción

Alivia la presión en la zona del talón, mejorando la distribución del peso corporal. Promueve una mejora en la alineación y estabilidad de la pisada, disminuyendo el cansancio y reduciendo el estrés en cintura, miembros inferiores y rodillas. Esto ayuda a disminuir el cansancio y aporta mayor comodidad a la hora de caminar, ofreciendo un ajuste anatómico y flexible. Su soporte de tela ayuda a controlar la humedad, absorbiendo la sudoración.

Código externo

20.01.TC

Código interno

82.TC

Modo de acción

El gel amortigua y ayuda a absorber el impacto al caminar. Aumenta la absorción de impactos y brinda una excelente amortiguación durante las actividades deportivas, al caminar o estar parado durante períodos prolongados. Contribuye a aliviar dolores musculares. El diseño de celdas en la parte inferior mejora la adherencia al calzado. Su soporte de tela de velour ayuda a controlar la humedad, manteniendo los pies secos.

Materialidad

Elaboradas en TPE gel, elastómero de gran elasticidad y capacidad de amortiguación. En la superficie en contacto con el pie, la talonera está recubierta por una capa de velour que promueve el control de la humedad, manteniendo los pies secos y frescos, además de ayudar a combatir el mal olor y contribuir en la absorbsión de la sudoración.

Tabla de talles / Código de barras

Según número de calzado

S	35 - 41	7798162420073
L	39 - 47	7798162420080

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

- **1.** Retirar la película protectora de la base del producto.
- **2.** Introducir la talonera en el calzado con la cara de gel autoadhesiva hacia abajo.
- **3.** Presionar hasta que quede correctamente adherida.
- **4.** Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Quitar la talonera si siente entumecimiento, hormigueo o la extremidad fría o pálida. Se recomienda renovar la talonera cada seis meses. Esto puede variar de acuerdo a la frecuencia de uso del producto.

Envase	Blister plástico	
Cantidad	1 par	
Color	Verde	
NCM	6406.90.20	
Peso sin env	ase	
Doco con on	//E a / 0 0//E Va	

Peso sin envase
Peso con envase

Volumen con envase
Industria/Origen

45 g / 0,045 Kg

413,25 cm3 / 0,000413 m3

China

maastra, origen cimia

Producto distribuído por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico: Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA -

Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:

www.ptm.global - info@ptm.global

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar. Secar con toalla para quitar el exceso de agua. Almacenar en lugar protegido de la humedad.







Capa inferior: 100% TPE gel



Capa superior: 98% Poliéster, 2% Elastano







Patologías

- * Bursitis del talón de Aquiles
- * Fascitis plantar
- * Tendinitis
- * Talalgia

Productos relacionados

PC-PT-TEA-TER-PS-PCH-PGL-OS-PD-SA-AD-DP-KP-TA-AG-AI-DG-JU-PM-STT

