



### Nombre

## Tobilera Acordonada Lace-up Ankle Support

Código externo

03.01.6400

Código interno

25.6400

### Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. Posee ballenas flexibles a ambos lados, que limitan los movimientos laterales y brindan estabilidad a la articulación, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares, las mismas pueden retirarse si así lo requiere el tratamiento. Su sistema de cierre acordonado permite una fácil colocación y ajuste, adaptándose a diferentes anatomías y necesidades del usuario. Puede utilizarse en ambos tobillos.

### Modo de acción

Las ballenas laterales flexibles brindan estabilidad dejando a la articulación en una posición neutra y limitando los movimientos de pronación y supinación del tobillo. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

### Materialidad

Elaborada con textil 100% poliéster, material de alta tenacidad y resistencia al desgarro, tracción y abrasión. El mismo se encuentra cubierto de una capa de poliuretano, el cual le brinda propiedades de impermeabilidad y suavidad.

### Tabla de talles / Código de barras

Según número de calzado

S	35 - 38	7798128671631
M	38 - 40	7798128671648
L	40.5 - 42	7798128671983
XL	42.5 - 45	7798128671662

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	95 g / 0,095 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global

### Instrucciones de uso

- Desajustar los cordones e introducir el pie en la tobillera. El orificio debe coincidir con el talón, dejando la lengüeta sobre el empeine.
- Ajustar los cordones y la cinta elástica. Pasar las cintas por sobre el empeine, luego por debajo del pie y ajustar el abrojo en los laterales.
- Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

### Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos y extraer las ballenas. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



### Composición

Poliéster 100%

### Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

### Patologías

- \* Síndrome del túnel tarsal - o síndrome del túnel tarsiano o neuralgia del nervio tibial posterior-
- \* Pie cavo varo, recto o valgo
- \* Pie cavo anterior o posterior
- \* Esguinces
- \* Inestabilidad
- \* Pie zambo
- \* Inestabilidad crónica del tobillo
- \* Luxaciones
- \* Afecciones ligamentarias
- \* Artritis
- \* Traumatismos

### Productos relacionados

T1 - T2 - T3