



Nombre

Talonera Para Espolón - Punto Azul

Calcaneal Spur Heel

Código externo

20.01.TEA

Código interno

82.TEA

Descripción

Alivia la presión en la zona del talón, mejorando la distribución del peso corporal. Promueve una mejora en la alineación y estabilidad de la pisada, disminuyendo el cansancio y reduciendo el estrés en cintura, miembros inferiores y rodilla. Su gota de gel extraíble genera un espacio para alojar el espolón calcáneo, aliviando las molestias y ayudando a acelerar su proceso de recuperación. Aporta mayor comodidad a la hora de caminar, ofreciendo un ajuste anatómico y flexible.

Modo de acción

El gel amortigua y ayuda a absorber el impacto al caminar, durante actividades deportivas, o al estar parado durante períodos prolongados. Cuando se extrae la gota de gel, se genera una cavidad para que la zona donde se acomoda el espolón sea más blanda y flexible. De esta forma alivia las molestias con el calzado, ayudando a disminuir el dolor y acelerando su rehabilitación.

Materialidad

Elaboradas en gel de poliuretano, elastómero de gran elasticidad, capacidad de amortiguación y aislación térmica.

Tabla de tallas / Código de barras

Según número de calzado

S	35 - 41	7798162420394
L	39 - 47	7798162420387

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talla diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Retirar la película protectora de la base del producto.
2. Extraer la gota de gel azul para su uso en caso de espolón calcáneo.
3. Introducir la talonera en el calzado con la cara plana autoadhesiva hacia abajo. La cavidad para el espolón debe quedar hacia arriba.
4. Presionar hasta que quede correctamente adherida.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Quitar la talonera si siente entumecimiento, hormigueo o la extremidad fría o pálida. Se recomienda renovar la talonera cada seis meses. Esto puede variar de acuerdo a la frecuencia de uso del producto.

Envase	Blisters plásticos
Cantidad	1 par
Color	Transparente c/punto azul
NCM	6406.90.20
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	China

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar. Secar con toalla para quitar el exceso de agua. Almacenar en lugar protegido de la humedad.



Patologías

- * Espolón calcáneo
- * Fascitis plantar

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Composición

100% Gel de poliuretano

Productos relacionados

PC-TC-PD-TER-PS-PCH-PGL-OS-PT-SA-TM-AD-DP-KP-TA-AG-AI-DG-JU-PM-STT