



Nombre

Collar cervical Philadelphia con traqueo

Philadelphia cervical Collar for tracheotomy

Código interno

1201-4519T

Código externo

P271W4519T

Descripción

Brinda inmovilización, descargando el peso de la cabeza sobre el producto y manteniendo el cuello en una posición neutra. Indicado para post operatorios de traqueotomía, su abertura frontal permite alojar una cánula. Ayuda a contener los músculos y disminuir la movilidad de la región El sistema de cierre con abrojos permite regular el ajuste del producto según las necesidades de tratamiento y anatomía de cada usuario.

Modo de acción

El cuello limita la flexión, extensión y rotación del cuello. Su soporte posterior y de mentrón ayudan a menter el cuello en posición neutra, relajan los músculos y ligamentos de la zona, además de equilibrar la cabeza. Su diseño acompaña la anatomía del hombro y contorno de mandíbula, brindando mayor estabilidad y comodidad.

Materialidad

Elaborado en polietileno expandido, material con gran adaptabilidad, fiermeza y peso ligero. Permite realizar radiografías, tomografía axial computarizada y resonancias magnéticas nucleares. El contacto de los materiales -polietileno y algodón- con la piel no produce picazón ni alergia.

Tabla de talles / Código de barras

Circunferencia Altura anterior Máx. cuello Máx. cuello			
XS	32 cm	9 cm	7798094541433
S	40 cm	10 cm	7798094541440
M	46 cm	11 cm	7798094541457
L	48 cm	12 cm	7798094541464
XL	50 cm	14 cm	7798094541471

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

- 1. Desabrochar los abrojos.
- 2. Sostener la pieza posterior del collar alrededor de la zona cervical del cuello.
- 3. Colocar la pieza delantera procurando pasar la cánula por la abertura frontal, el mentón debe ir apoyado sobre el soporte frontal.
- **4.** Ajustar los abrojos y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Puede ocasionar debilidad en la musculatura cervical como consecuencia de su uso prolongado. Existe la posibilidad de que se formen úlceras por presión en las distintas zonas de apoyo del producto.

Envase	Bolsa		
Cantidad	1 unidad		
Color	Natural		
NCM	9021.10.10.100T		
Peso sin envase		86 g / 0,086 Kg	
Peso con envase			
Volumen con envase			
Industria/Origen		Argentina	

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:

Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA -Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:

www.ptm.global - info@ptm.global

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados el abrojo. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.











Polietileno expandido de celdas cerradas 100%







 Traqueotomía Cervicobraquialgias

* Laminectomías

* Latigazo cervical

* Traumatismos en partes blandas

Tortícolis tratadas quirúrgicamente Tortícolis -dolor de cuello, cuello rígido o cuello

* Procesos reumáticos degenerativos * Procesos reumáticos inflamatorios * Subluxación de vértebras cervicales

* Traumatismos óseos leves

* Artrodesis

torcido-

* Fracturas aisladas de las apófisis espinosas * Artritis cervical Contracturas musculares * Esguinces cervicales leves o moderados sin

4508 - 4519

Productos relacionados

