



Nombre

Faja sacrolumbar Advance 3

Lumbo-sacral support

Código externo

1207-FW3

Código interno

P251WFW3

Descripción

Brinda contención semi firme a la zona sacrolumbar, permitiendo realizar movimientos con mayor flexibilidad y confort. Desarrollada con tejido respirable en la zona lumbar, que contribuye a mantener la piel seca. Indicada para el tratamiento de dolencias y traumatismos asociados al área torácica y abdominal. Cuenta con cinco ballenas flexibles en la parte posterior, que ayudan a mejorar la postura, y bandas de ajuste laterales dispuestas en V desde la columna hasta el abdomen, que permiten una mayor regulación. Su sistema de cierre permite regular la compresión acorde al tratamiento indicado.

Modo de acción

Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos. El sistema de bandas de ajuste laterales permite una doble compresión, regulable según los requerimientos de cada tratamiento. Las ballenas plásticas flexibles colaboran con el soporte y limitan moderadamente la flexo-extensión de la zona, favoreciendo una rápida recuperación.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico de trama cerrada, que brinda compresión firme y es agradable al tacto; compuesto por poliéster y elastodieno. La zona posterior de la faja, también realizada con spandex y poliéster, brindan elasticidad y suavidad al producto. El elastodieno es un material que no genera electricidad estática y cuenta con un alto grado de recuperación elástica.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de cintura

Talle	Medida	Código de barras
S	63 - 75 cm.	7798094541723
M	75 - 87 cm.	7798094541730
L	87 - 99 cm.	7798094541747
XL	99 - 111 cm.	7798094541754
XXL	111 - 123 cm.	7798094541761

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Colocar la faja alrededor del abdomen, con los elásticos hacia los laterales. La línea blanca debe quedar en la parte superior, y la violeta en el borde inferior de la faja.
3. Ajustar el abrojo principal, luego las bandas de ajuste laterales para una doble compresión.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Espondilolisis
- * Espondiloartrosis
- * Lumbalgias
- * Lumbociatalgias
- * Sacroileítis

Composición

Poliéster 79%, Elastodieno 18%, Algodón 3%

Productos relacionados

FW1 - 610 - 611 - 600 - 615 - 620 - 630 - 635 - 640 - 660 - 670

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global