



Nombre

## Plantilla confort gel

### Confort gel insoles

Código externo

20.01.PC

Código interno

82.PC

Descripción

Alivia la presión en zonas críticas de los pies, mejorando la distribución del peso corporal. Promueve una mejora en la alineación y estabilidad de la pisada, disminuyendo el cansancio y reduciendo el estrés en cintura, miembros inferiores y rodillas. Esto ayuda a disminuir el cansancio y aporta mayor comodidad a la hora de caminar, ofreciendo un ajuste anatómico y flexible. Su soporte de tela ayuda a controlar la humedad, absorbiendo la sudoración.

Modo de acción

El gel amortigua y ayuda a absorber el impacto al caminar. Aumenta la absorción de impactos y brinda una excelente amortiguación durante las actividades deportivas, al caminar o estar parado durante períodos prolongados. Contribuye a aliviar dolores musculares. El diseño de celdas en la parte inferior mejora la adherencia al calzado. Su soporte de tela de velour ayuda a controlar la humedad, manteniendo los pies secos.

Materialidad

Elaboradas en TPE gel, elastómero de gran elasticidad y capacidad de amortiguación. En la superficie en contacto con el pie, la plantilla está recubierta por una capa de velour que promueve el control de la humedad, manteniendo los pies secos y frescos, además de ayudar a combatir el mal olor y contribuir en la absorción de la sudoración.

Tabla de tallas / Código de barras

Según número de calzado

S	35 - 41	7798162420011
L	39 - 47	7798162420028

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talla diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Verificar el talla y recortar a lo largo de las líneas superiores de ser necesario.
2. Introducir la plantilla en el calzado con la cara de gel hacia abajo.
3. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Quitar la plantilla si siente entumecimiento, hormigueo o la extremidad fría o pálida. Se recomienda renovar la plantilla cada seis meses. Esto puede variar de acuerdo a la frecuencia de uso del producto. Para su correcto uso, se sugiere reemplazar la plantilla regular del calzado por la plantilla confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar. Secar con toalla para quitar el exceso de agua. Almacenar en lugar protegido de la humedad.



Patologías

- \* Bursitis del talón de Aquiles
- \* Enfermedad de Sever
- \* Fascitis plantar
- \* Tendinitis
- \* Talalgia

Composición

Capa superior: 98% Poliéster, 2% Elastano  
Capa inferior: 100% TPE gel

Productos relacionados

PT-TC-TEA-TER-PS-PCH-PGL-OS-PD-SA-TM-AD-DP-KP-TA-AG-AI-DG-JU-PM-STT

Envase	Blister plástico
Cantidad	1 par
Color	Verde
NCM	6406.90.20
Peso sin envase	
Peso con envase	185 g / 0,185 Kg
Volumen con envase	1050,00 cm3 / 0,001050 m3
Industria/Origen	China

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global