



Nombre

Cabestrillo pediátrico doble sujeción

Pediatric double-strap arm sling

Descripción

Brinda sujeción firme al brazo y antebrazo, permitiendo una mejor y más pronta recuperación. Diseñado para dolencias del hombro, fracturas y luxaciones del brazo, codo y antebrazo. De simple y rápida colocación. Cuenta con dos tiras regulables que permiten ajustar el producto a la altura deseada. Incluye un pack de accesorios bordados para personalizar el cabestrillo. Funciona también como sostén de yesos y férulas. Puede utilizarse en ambos brazos.

Código externo

1104-501D

Código interno

P261W501D

Modo de acción

El cabestrillo contiene y estabiliza la articulación del hombro, además de aliviar la descarga que se ejerce sobre el mismo, dejándolo en reposo para una correcta sanación. La sujeción del brazo resulta fundamental para la recuperación de traumatismos y patologías en muñeca, codo, antebrazo, brazo y hombro. Las tiras permiten ajustar la posición del cabestrillo según las necesidades del usuario.

Materialidad

Elaborado a partir de un tejido 100% algodón, material de fibra natural que brinda respirabilidad a la piel y evita una sudoración excesiva.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de pecho

P	56 - 70 cm.	7798094541907
---	-------------	---------------

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talla diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Introducir el brazo a través del cabestrillo, pasando la mano por el orificio. El lado largo del cabestrillo debe sostener el antebrazo.
3. Pasar la tira del hombro rodeando el cuello, por delante del pecho, y luego a través del pasador superior, ajustando según necesidad. El brazo debe quedar a 90°.
4. Llevar la tira inferior desde la espalda hacia delante, rodeando la cintura e introduciéndola por los pasadores inferiores del cabestrillo.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Colocación de accesorios

1. Calentar la plancha durante 5 minutos.
2. Colocar el parche sobre la prenda con la parte bordada hacia arriba.
3. Aplicar calor con la plancha durante 60 segundos aprox y repasar los bordes.
4. Girar del revés el cabestrillo y volver a aplicar calor durante 60 segundos.
5. Esperar que enfríe la prenda y verificar que se haya pegado correctamente. En caso contrario repetir los pasos.

Composición

Algodón 100%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar los accesorios colocados.



Patologías

- * Luxaciones de brazo, codo, muñeca y antebrazo
- * Traumatismos de hombro, codo y muñeca
- * Subluxaciones de la articulación escapulo humeral
- * Fracturas de brazo, codo, muñeca y antebrazo

Productos relacionados

501N - 501C - 502 - 503 - 504 - 1216

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Uso sin prescripción

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global