



Nombre

Inmovilizador de muñeca

Wrist splint

Código externo

01.01.6000

Código interno

25.6000

Descripción

Brinda inmovilización a la muñeca mediante el uso de dos ballenas de aluminio que contienen la articulación e impiden que la muñeca se desplace lateralmente, se extienda o flexione. Indicado para el tratamiento de esguinces, fracturas y traumatismos. Cuenta con tiras regulables que permiten ajustar el producto adaptándose a la anatomía de cada usuario. Fabricado en tela bondeada que optimiza el confort y otorga calor terapéutico, ayudando a la desinflamación de la articulación. El producto puede ser utilizado en ambas muñecas.

Modo de acción

Las ballenas anatómicas en la palma y el dorso de la mano limitan el movimiento de la muñeca, que sumado al calor terapéutico que brinda el textil bondeado, ayudan a una rápida desinflamación de la articulación. Ajustando en la zona del antebrazo, la muñeca y la mano, mantiene la articulación en una posición neutra, colaborando en la recuperación de las dolencias. Los abrojos permiten regular el ajuste del inmovilizador de acuerdo a las necesidades del tratamiento y la anatomía de cada usuario.

Materialidad

Elaborado a partir de un textil bondeado, compuesto por goma espuma, jersey de algodón y velour de poliamida. El laminado interno de jersey de algodón, resultando amigable al contacto con la piel, mientras que el velour de poliamida de la cara externa cumple la función de sujeción del abrojo y es agradable al tacto. El interior del material está compuesto por goma espuma de poliuretano de 8 milímetros de espesor, la cual otorga un acolchado cómodo y protege la articulación de posibles golpes. El resultado de esta combinación de materiales es una tela confortable, agradable al tacto y con una excelente eficiencia terapéutica.

Tabla de tallas / Código de barras

UNIVERSAL 7798094541310

Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño o producto diferente.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Colocar la pieza que tiene la ballena curva en la palma de la mano, dejando la parte más ancha del producto del lado del antebrazo.
3. Acomodar la segunda pieza en el dorso de la mano.
4. Ajustar los abrojos, pasando las tiras por los pasadores.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. En caso de extraer las ballenas, tener la precaución de colocar la curva cóncava de la ballena palmar hacia el interior del producto.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos y extraer las ballenas. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Traumatismos del carpo y metacarpo
- * Postcirugía óseo-tendinosa del carpo
- * Secuelas dolorosas por inflamación en artrosis y artritis
- * Inestabilidad residual
- * Tendinitis
- * Fracturas sin dislocaciones
- * Artrosis con edema
- * Distensiones

Composición

Espuma de Poliuretano 36% Poliamida 32%
Algodón 32%

Productos relacionados

M5 - M6 - M7 - M8 - 6020 - 6021

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global