



Nombre

### Cincha rotuliana Patella brace

Código externo

03.02.R6

Código interno

16.R6

Descripción

Brinda soporte a la rótula, posicionándola en su lugar natural. Mediante un pad de compresión patelar, ejerce presión sobre el tendón, con el objetivo de descargar la tensión acumulada. Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico. Su peso ligero y ajuste regulable conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir dolores articulares. Puede utilizarse en ambas rodillas.

Modo de acción

La cincha aplica fuerzas que ayudan a la centralización de la rótula cuando la rodilla se flexiona o extiende. La presión es ejercida desde la parte inferior para evitar corrimientos laterales. El tendón puede sufrir microrupturas por la sobre exigencias durante la práctica deportiva, la cincha actúa durante los movimientos excéntricos, conteniendo la rótula y evitando posibles lesiones.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3,5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es confortable al contacto con la piel y contribuye a la a contención del calor.

Tabla de talles / Código de barras

<b>UNIVERSAL</b>	7798094547978
------------------	---------------

Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos y quitar el abrojo interno de seguridad.
2. Colocar la rodillera situando el cilindro de compresión patelar debajo de la rótula y el logo PROFIT hacia el frente.
3. Pasar la cincha de neoprene por detrás, a través del pasador y abrochar el abrojo.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Envase	Bolsa
--------	-------

Cantidad	1 unidad
----------	----------

Color	Negro
-------	-------

NCM	6307.90.90
-----	------------

Peso sin envase	30 g. / 0.03 Kg.
-----------------	------------------

Peso con envase	
-----------------	--

Volumen con envase	
--------------------	--

Industria/Origen	Argentina
------------------	-----------

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- \* Enfermedad de Osgood Schlatler
- \* Síndrome patelo-femoral
- \* Tendinitis patelar
- \* Tendinosis
- \* Tendinitis
- \* Rodilla de saltador
- \* Tenosinovitis
- \* Rodilla de futbolista
- \* Patología meniscal
- \* Lesiones osteocondrales
- \* Osteocondritis disecante

Composición

Interior: Policloropreno 100%,  
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

R2 - R3 - R4 - R5 - R7 - R8 - R9 - ER1 - RAS

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:  
www.ptm.global - info@ptm.global