



Nombre

## Rodillera Abierta Universal

Universal Open Knee Support

Código externo

03.02.RAU

Código interno

16.RAU

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión leve y calor terapéutico a la articulación. Su diseño completamente abierto permite una fácil colocación y ajuste, adaptándose a diferentes anatomías y necesidades terapéuticas. La apertura rotuliana mejora la contención y ayuda a mantener a la articulación en una posición neutra. Su peso ligero conforma un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudan a prevenir esguinces y dolores articulares. Puede utilizarse en ambas rodillas.

Modo de acción

La rodillera abierta con sistema de abrojos genera fuerzas que mantienen la articulación en una posición neutra, adaptándose a distintos niveles de ajuste según el tratamiento indicado. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones de rodilla se logra mediante la estabilización de la rótula, aplicando compresión moderada sobre la zona. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara interna y externa. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento ofrece control de elasticidad y una suave textura.

Tabla de talles / Código de barras

Se adapta a todos los talles.

**Universal**

7798128675516

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Colocar la rodillera alrededor de la rodilla, de modo que el orificio central quede sobre la rótula. La tira más larga debe quedar en la parte superior.
3. Ajustar abrojo central, y luego la tira superior e inferior.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Envase

Bolsa

Cantidad

1 unidad

Color

Negro

NCM

6307.90.90.9000

Peso sin envase

109 g / 0.109kg

Peso con envase

Volumen con envase

Industria/Origen

Argentina

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado el abrojo. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- \* Contusiones
- \* Desorden patelofemoral leve
- \* Distensiones
- \* Esguinces leves
- \* Inflamación
- \* Tendinitis patelar

Composición

Interior: Policloropreno 100%  
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - R9 - ER1 - RAS

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:  
www.ptm.global - info@ptm.global