



Nombre

Sportaping - Venda autoadhesiva

Self-adhesive bandage

Código externo

1451-CAD5/7

Código interno

P771PCAD5/7

Descripción

Brinda protección y soporte a músculos y articulaciones, y ayuda en el tratamiento de lesiones. Ofrece protección, estabilidad y compresión en la zona afectada, ya sea para promover la rehabilitación o como prevención durante la práctica deportiva. Se caracteriza por su capacidad autoadhesiva, con lo cual el vendaje se mantiene firme sin necesidad de colocar un sujetador.

Modo de acción

Ofrece soporte activo para el tratamiento y la prevención de torceduras y lesiones en general. El vendaje proporciona apoyo hemodinámico y ofrece comodidad al usuario -que puede continuar su actividad habitual-. Se lo conoce como anclaje de la articulación, porque aumenta la rigidez de la misma a fin de evitar lesiones causadas por la exigencia al practicar deporte. Su cualidad autoadhesiva permite que el vendaje se mantenga firme sin la necesidad de sujetadores adicionales.

Materialidad

El vendaje se compone de un tejido completamente confeccionado en algodón, material que por su origen natural e inocuidad no causa irritación en la piel. El material adhesivo que fija el vendaje a la piel es un compuesto sintético hipoalergénico que no se adhiere de manera permanentemente.

Tabla de talles / Código de barras

CAD5	6 unidades	7798128672652
CAD7	6 unidades	7798128673031

Envase	Dispenser
Cantidad	6 unidades
Color	Blanco
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	25 g / 0,025 Kg
Peso con envase	CAD5x6 0,285 Kg CAD7x6 0,305 Kg
Volumen con envase	CAD5x6 0,0010795 m ³ CAD7x6 0,001567 m ³
Industria/Origen	China

Instrucciones de uso

1. Enrollar la venda alrededor de la zona afectada en forma de espiral, comenzando por el extremo del miembro y encimando la mitad de la venda sobre la colocada anteriormente.
2. Verificar que se formen la menor cantidad de arrugas.
3. Acomodar hasta lograr un grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Almacenar en lugar protegido de la humedad. No exponer al sol o altas temperaturas.

Composición

Algodón 100%

Advertencias y Recomendaciones

Si se desconoce la forma adecuada de colocación del vendaje acorde a cada necesidad, se sugiere consultar previamente a un especialista. En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. La excesiva tensión de ajuste del vendaje puede impedir la correcta circulación sanguínea. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Quite el vendaje si siente entumecimiento, hormigueo o la extremidad fría o pálida, frote suavemente el área y vuelva a realizar un vendaje cuando se recupere. Producto no reutilizable. Descartar una vez utilizado.

Patologías

- * Laxitudes ligamentosas
- * Distensiones ligamentosas
- * Tendinitis
- * Tendinosis
- * Esguinces
- * Episodios repetidos de lesiones idénticas
- * Profilaxis

Productos relacionados

VD - CAT - VPS - VPF - CPT

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-28 CUIT: 30-59163398-4. Uso sin prescripción.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global