



Nombre

Codera Air Sport con banda de ajuste

Código externo

1103.CAS2N

Código interno

P461PCAS2N

Air Sport elbow support with adjustable strap

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión a la articulación. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. La banda de ajuste con abrojo, aporta fuerzas adicionales de compresión. Puede ser utilizada en ambos codos.

El tejido tubular respirable sin costuras y anatómico permite practicar deportes sin la acumulación de humedad.

Modo de acción

La codera aplica fuerzas multidireccionales en el codo que mantienen las articulaciones en una posición neutra. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones del codo se logra mediante la estabilización de la articulación y la aplicación de compresión localizada sobre la zona, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración. La banda de ajuste aporta fuerzas adicionales para proteger el tejido.

Materialidad

El spandex, poliéster y elastodieno, brindan elasticidad al producto. El spandex es un material de secado rápido, resistente a la sudoración, que no genera electricidad estática y cuenta con un alto grado de recuperación elástica. El poliéster, posee un excelente cuadro de propiedades mecánicas, tenacidad elevada y características de deslizamiento y resistencia al desgaste superiores. Este material también se destaca por su alto grado de respirabilidad.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de codo

S	22 - 24 cm.	7798128676100
M	25 - 28 cm.	7798128676117
L	29 - 32 cm.	7798128676124

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar el abrojo.
2. Introducir el brazo a través de la codera.
3. El codo debe ubicarse en la parte media de la codera, con la tres líneas blancas sobre el pliegue del codo.
4. La banda de ajuste debe quedar en la zona del antebrazo
5. Ajustar el abrojo, con los músculos del antebrazo relajados.
6. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado el abrojo. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Miositis
- * Bursitis
- * Artritis
- * Lesiones inflamatorias
- * Esguinces leves
- * Inestabilidad articular
- * Epicondilitis lateral

Composición

Poliéster 49%, Elastodieno 42%, Elastano 9%

Productos relacionados

C1 - C2 - C4 - VDNE - VDNA - VD

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro con naranja
NCM	6307.90.90.900Q
Peso sin envase	0.054 kg
Peso con envase	0.066 kg
Volumen con envase	0,0019375 m ³
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global