



Nombre

Corrector de postura. Neoprene

Neoprene Posture Corrector

Código externo

02.03.E1

Código interno

16.E1

Descripción

Brinda corrección postural progresiva, y de esta manera ayuda a prevenir y tratar dolencias asociadas a la columna vertebral y los músculos de la espalda. Una mala postura puede derivar en graves trastornos físicos en diferentes partes del cuerpo, que a mediano y largo plazo pueden pronunciarse. El producto está compuesto por dos piezas de neoprene que brindan sostén a los hombros y se ajustan en la zona abdominal, aplicando así la tensión y ajuste necesarios. El material acolchado por la goma interna del neoprene, ayuda a evitar posibles molestias e irritaciones, permitiendo un uso comfortable a lo largo del día.

Modo de acción

La tensión que se aplica al ajustar el producto genera que los hombros se desplacen hacia atrás; reubicando la columna en la postura adecuada. Su sistema de ajuste y cierre permite regular el nivel de tensión que ejerce el producto.

Materialidad

Elaborada en neoprene de 3 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en ambas caras. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento ofrece control de elasticidad y una suave textura.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de pecho.

S	70 - 85 cm.	7798094545929
M	85 - 106 cm.	7798094545936
L	106 - 122 cm.	7798094545943

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talla diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar el abrojo.
2. Pasar ambos brazos por las aberturas circulares.
3. Tomar ambas piezas por los extremos, cruzarlas por la espalda y llevarlas hacia el abdomen.
4. Abrochar regulando la tensión deseada y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Para pieles sensibles utilizar una prenda de algodón debajo del espaldar.

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	245 g / 0,245 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Cifosis
- * Dolor cervical, torácico y/o lumbar.
- * Hernias de disco
- * Lumbalgias
- * Protusiones
- * Profilaxis
- * Mialgias

Composición

Interior: Policloroaplano 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

L1- 305 - 306 - SLE

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global