



Nombre

Faja abdominal con refuerzo

Reinforced abdominal binder

Código externo

02.05.620

Código interno

03.620

Descripción

Brinda soporte firme a la zona media y baja del tronco. Indicada para el tratamiento de dolencias y traumatismos asociados al área torácica y abdominal. Fabricada con elásticos de alta compresión y alta elasticidad, su función principal es prestar soporte y compresión. Cuenta con una ballena flexible en la parte posterior, que ayuda a una mejor postura, y elásticos laterales que permiten una mayor regulación de ajuste. Su sistema de cierre permite regular la compresión acorde al tratamiento indicado.

Modo de acción

La faja brinda fuerzas de compresión, las cuales proveen contención al abdomen y a la parte baja de la espalda. Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos. El sistema de elásticos laterales permite una doble compresión, regulable según los requerimientos de cada tratamiento. La ballena plástica flexible colabora con el soporte, favoreciendo una rápida recuperación.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico de trama cerrada, que brinda compresión firme, respirabilidad de la piel, y es agradable al tacto; compuesta por poliéster y elastodieno.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de cintura

Talle	Medida	Código de barras
S	63 - 75 cm.	7798094540771
M	75 - 87 cm.	7798094540788
L	87 - 99 cm.	7798094540795
XL	99 - 111 cm.	7798094540801
XXL	111 - 123 cm.	7798094540818

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Beige
NCM	6212.20.00
Peso sin envase	160 g. / 0.16 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Colocar la faja alrededor del abdomen, con los elásticos hacia los laterales. El logo Wellbrace debe quedar visible desde el frente y en la parte superior de la faja.
3. Ajustar el abrojo principal, luego las bandas de ajuste laterales para una doble compresión. Primero la banda izquierda, luego abrochar la banda de ajuste derecha sobre la anterior.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Poliéster 70% Elastodieno 30%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Patologías

- * Espondilolisis
- * Espondiloartrosis
- * Lumbalgias
- * Hernias
- * Lumbociatalgias
- * Traumatismos leves
- * Desagarro muscular
- * Hipotonía de la musculatura abdominal
- * Hipertonía muscular posterior
- * Eventraciones
- * Contusiones
- * Profilaxis

Productos relacionados

600 - 610 - 611 - 615 - 630 - 635 - 640 - 660 - 670