



Nombre

Faja de trabajo Worker
Worker support

Código externo

02.08.700

Código interno

04.700

Descripción

Brinda soporte firme y compresión a la zona media y baja del tronco, protegiendo los músculos de la zona lumbar. Indicada para el tratamiento y prevención de lesiones causadas por el levantamiento de cargas. Confeccionada con materiales de alta resistencia y elasticidad. Cuenta con cuatro ballenas flexibles en la parte posterior, que ayudan a una mejor postura, y bandas de ajuste laterales, las cuales permiten una mayor regulación. Los tiradores aseguran que la faja se mantenga en su correcta ubicación, y funcionan como sostén cuando la faja es desajustada, en los momentos que no se requiera su uso. En la parte interna, el producto contiene dos tiras antideslizantes, que evitan su desplazamiento. Su sistema de cierre permite regular la compresión y adaptarse a la anatomía de cada usuario.

Modo de acción

Presta soporte y calor terapéutico a la zona media y baja del tronco. Se recomienda su uso durante la realización de tareas que impliquen levantamiento de peso, ya que se genera una sobre exigencia en los músculos de la zona sacrolumbar. La faja disminuye la carga sobre estos músculos, aliviando traumatismos y distensiones en los mismos, y previniendo futuras lesiones. El sistema de bandas de ajuste laterales permite una doble compresión, regulable según los requerimientos de cada usuario. Las ballenas plásticas flexibles colaboran con el soporte y limitan moderadamente la flexo-extensión de la zona.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico de trama cerrada, que brinda compresión firme, respirabilidad a la piel, y es agradable al tacto; compuesto por poliéster y elastodieno.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de cintura

S	60 - 79 cm.	7798094541358
M	79 - 99 cm.	7798094541365
L	99 - 119 cm.	7798094541372
XL	119 - 139 cm.	7798094541389
XXL	139 - 160 cm.	7798128672270

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Pasar ambos brazos por los tiradores y ajustarlos a su medida de modo tal que pueda colocarse la faja en la zona baja de la columna.
3. Colocar la faja alrededor del abdomen. El logo Wellbrace debe quedar visible desde el frente.
4. Ajustar el abrojo principal y luego las bandas de ajuste laterales para una doble compresión.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Poliéster 70% Elastodieno 30%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda. Combinar el uso de la faja con técnicas correctas de levantamiento de cargas.

Patologías

- * Lumbalgia, ciática
- * Lesiones en músculos de espalda
- * Profilaxis laboral
- * Traumatismos profesionales

Productos relacionados