



Nombre

Faja sacrolumbar alta

High lumbo-sacral support

Código externo

02.07.630

Código interno

03.630

Descripción

Brinda soporte firme y compresión a la zona media y baja del tronco. Indicada para el tratamiento de dolencias y traumatismos asociados al área torácica y abdominal. Confeccionada con materiales de alta resistencia y elasticidad. Cuenta con cinco ballenas flexibles en la parte posterior y dos ballenas laterales, que ayudan a una mejor postura, y bandas de ajuste laterales que permiten una mayor regulación. Su sistema de cierre permite regular la compresión acorde al tratamiento indicado.

Modo de acción

Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos. El sistema de bandas de ajuste laterales permite una doble compresión, regulable según los requerimientos de cada tratamiento. Las ballenas plásticas flexibles colaboran con el soporte y limitan moderadamente la flexo-extensión de la zona, favoreciendo una rápida recuperación.

Materialidad

Elaborada a partir de elástico de trama cerrada, que brinda compresión firme, respirabilidad a la piel, y es agradable al tacto; compuesto por poliéster y elastodieno. En la parte posterior cuenta con una zona de lona de algodón, reforzada con cuerina sintética.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de cintura

Talle	Medida	Código de barras
S	63 - 75 cm.	7798094540825
M	75 - 87 cm.	7798094540832
L	87 - 99 cm.	7798094540849
XL	99 - 111 cm.	7798094540856
XXL	111 - 123 cm.	7798094540863

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

- Desabrochar los abrojos.
- Colocar la faja alrededor del abdomen, con los elásticos hacia los laterales. El logo Wellbrace debe quedar visible desde el frente y en la parte superior de la faja.
- Ajustar el abrojo principal, luego las bandas de ajuste laterales para una doble compresión.
- Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. El ajuste correcto es aquel que no restringe la respiración e incluso ayuda a una respiración más profunda.

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Beige
NCM	
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Poliéster 70% Elastodieno 30%

Patologías

- * Espondilolisis
- * Espondiloartrosis
- * Lumbalgias
- * Lumbociatalgias
- * Sacroileítis
- * Procesos degenerativos

Productos relacionados

610 - 611 - 600 - 615 - 620 - 635 - 640 - 660 - 670