



Nombre

**Gemelera**  
Calf Support

Código externo

03.05.G1

Código interno

16.G1

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la pantorrilla. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir distensiones, inflamaciones y desgarros. Su diseño tubular brinda una contención uníforme a toda la pantorrilla y se adapta a la anatomía de cada usuario. Puede utilizarse en ambas piernas.

Modo de acción

La gemelera genera fuerzas que mantienen a los músculos de la pantorrilla en una posición neutra. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones se logra mediante la estabilización de tejidos y músculos de la zona, aplicando compresión moderada. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3.5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es comfortable al contacto con la piel y contribuye a la contención del calor.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de pantorrilla, 10 cm debajo de la rótula

S	28 - 32 cm.	7798128672959
M	32 - 36 cm.	7798128672966
L	36 - 40 cm.	7798128672973
XL	40 - 44 cm.	7798128672980

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Introducir la pierna a través de la gemelera y deslizar hacia arriba hasta ubicarla sobre la pantorrilla. El logo PROFIT debe quedar en la parte superior, hacia el frente.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- \* Laxitudes ligamentosas
- \* Distensiones ligamentosas
- \* Tendinitis y tendinosis
- \* Desgarros

Composición

Interior: Policloropreno 100%  
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

Envase	<b>Bolsa</b>
Cantidad	<b>1 unidad</b>
Color	<b>Negro</b>
NCM	<b>6307.90.90</b>
Peso sin envase	<b>75 g / 0,075 Kg</b>
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	<b>Argentina</b>

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global