



Nombre

Inmovilizador de dedo Finger Splint

Código externo

01.02.6021

Código interno

25.6021

Descripción

Indicado en casos de lesiones o traumatismos de falange y articulaciones interfalángicas. Brinda inmovilización y sujeción firme a los dedos de la mano, mediante una ballena de aluminio, que limita el movimiento y ayuda a mantener al dedo en una posición neutra. El sistema de cierre con abrojos permite regular el ajuste del producto según las necesidades de tratamiento y anatomía de cada usuario. Su diseño permite el uso en cualquier dedo de la mano exceptuando el pulgar.

Modo de acción

El inmovilizador logra evitar movimientos de flexión o extensión en las articulaciones interfalángicas de los dedos, ayudando a la recuperación de traumatismos o lesiones, además de brindar contención y calor terapéutico. El espesor de la ballena de aluminio permite que la misma se mantenga rígida en posición recta o que el especialista la pueda flexionar según la necesidad y lesión del paciente.

Materialidad

Elaborado en neoprene de 1,5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en ambas caras. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. su revestimiento ofrece control de elasticidad y una suave textura.

Tabla de talles / Código de barras

Según largo de dedo.

S	7798128673529
L	7798128673536

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desajustar los abrojos.
2. En caso de que el especialista indique flexionar la ballena, puede realizarlo aplicando la fuerza necesaria hasta llegar a la curvatura deseada.
3. Ubicar el dedo lesionado sobre la ballena haciendo coincidir la punta de la misma con la punta del dedo.
4. Acomodar el elástico corto sobre la mano y pegar el abrojo en la cara interna del elástico largo, la felpa sobre este último debe quedar visible.
5. Abrochar el abrojo superior alrededor de la punta del dedo.
6. Sujetar las tiras centrales de forma cruzada sobre la felpa del elástico.
7. Terminar de rodear la mano con el elástico hasta abrocharlo sobre sí mismo.
8. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	30 g / 0,030 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos y extraer la ballena. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Afecciones ligamentarias
- * Esguinces
- * Tendinitis
- * Artrosis
- * Contusiones
- * Inflamación tendinosa
- * Fracturas
- * Luxaciones
- * Artritis

Composición

Interior: Policloropleno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

M5 - M6 - M7 - 6000 - 6020 - 6021

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global