



Nombre

## Inmovilizador de muñeca con dedo pulgar

### Wrist and thumb splint

Código externo

01.02.M9

Código interno

16.M9

Descripción

Brinda soporte rígido y estabilización a la muñeca y al dedo pulgar. Mediante el uso de ballenas de aluminio, contiene las articulaciones e impide que se desplacen, favoreciendo la recuperación de esguinces, traumatismos y post-operatorios. Sus tiras regulables permiten ajustar el producto adaptándose a la anatomía de cada usuario. Puede utilizarse en ambas manos con solo cambiar la ballena palmar de lado.

Modo de acción

El inmovilizador cuenta con una ballena rígida anatómica que abarca desde la parte proximal de la muñeca hasta la parte media de los metacarpianos, y una ballena recta de aluminio para el dedo pulgar, las cuales limitan movimientos de flexión o extensión de las articulaciones. El alivio de distensiones, inflamaciones, esguinces y traumatismos se logra mediante la estabilización de las articulaciones en una posición neutra. Se puede ajustar el producto según necesidad de tratamiento regulando los abrojos. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Confeccionado en neoprene de 3,5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es confortable al contacto con la piel y contribuye a la contención del calor.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de muñeca

S	13 -16 cm.	7798094541549
M	16 - 18 cm.	7798094541556
L	18 - 20 cm.	7798094541563

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talla diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. El producto se presenta para ser utilizado en la mano derecha. Para utilizar en la mano izquierda, deberá cambiar la ballena al bolsillo contrario, dejando la curva cóncava del lado de plush, en la zona superior del bolsillo.
3. Colocar el lado de la ballena metálica del producto contra la palma de la mano, teniendo en cuenta que el dedo pulgar debe quedar junto a la pieza central más alta.
4. Tomar los abrojos laterales e introducirlos por los pasadores metálicos hasta abrochar los mismos.
5. Abrochar la tira con abrojo individual pasando por el espacio existente entre el dedo pulgar y el resto de los dedos.
6. Rodear el dedo pulgar con el abrojo.
7. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	60 g. / 0.06 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Interior: Policloropleno 100%  
Exterior: Poliamida 100%

Patologías

- \* Tendinitis del Túnel Carpiano
- \* Distensiones
- \* Contusiones
- \* Debilidad muscular
- \* Inflamación tendinosa
- \* Dolores reumáticos
- \* Artritis de muñeca
- \* Tendinitis
- \* Tenosinovitis
- \* Artrosis
- \* Esguinces severos

Productos relacionados

M5 - M6 - M7 - M8 - 6000 - 6020 - 6021

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global