



Nombre

Muslera Elástica

Elastic Thigh Support

Código externo

03.03.EU1

Código interno

45.EU1

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. El ajuste suave y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Su diseño tubular brinda un ajuste óptimo que se adapta a la anatomía de cada usuario. Puede utilizarse en ambas piernas.

Modo de acción

La muslera genera fuerzas que mantienen a los músculos del muslo en una posición neutra. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones se logra mediante la estabilización de las articulaciones, tejidos y músculos, aplicando compresión suave sobre la zona.

Materialidad

Elaborada a partir de tejido elástico, que brinda compresión suave, respirabilidad a la piel, y es agradable al tacto; compuesto por algodón -fibra natural, hipoalergénica-, y elastodieno.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno a la mitad del muslo

S	43 - 51 cm.	7798128671433
M	52 - 61 cm.	7798128671440
L	62 - 70 cm.	7798128671457

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Introducir la pierna a través de la muslera y deslizar hacia arriba hasta ubicarla sobre el muslo.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Dolores musculares
- * Lesiones tendinosas
- * Distensiones
- * Desgarros
- * Contracturas de cuádriceps, abductores e isquiotibiales

Composición

Algodón 76%
Elastodieno 24%

Productos relacionados

U1

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Crudo
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	45 g / 0,045 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global