



Nombre

Rodillera Abierta con Soporte Rotuliano Wrap-around Patella Brace

Código externo

03.02.R9

Código interno

16.R9

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. Su diseño abierto permite una fácil y rápida colocación del producto, adaptándose a las diferentes anatomías y necesidades del usuario. El cilindro de compresión interno brinda mayor soporte a la rótula, ayudando a mantenerla en una posición neutra. Las cintas de ajuste con abrojo permiten regular la compresión de la cincha según el tratamiento indicado, brindando soporte durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Puede utilizarse en ambas rodillas.

Modo de acción

La rodillera genera fuerzas de compresión, que junto al cilindro de soporte para rótula, y las cintas de ajuste con abrojo que brindan un segundo nivel de contención regulable, mantienen a la articulación en una posición neutra, promoviendo un mayor nivel de soporte y ajuste del producto. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones de rodilla se logra mediante la estabilización de la rótula, aplicando compresión moderada sobre la zona. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3.5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislamiento térmico, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es cómodo al contacto con la piel y contribuye a la contención del calor.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno 5 cm, por sobre la rótula

S	36 - 41 cm.	7798128671556
M	41 - 46 cm.	7798128671563
L	46 - 51 cm.	7798128671570
XL	51 - 56 cm.	7798128671587

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Colocar la rodillera alrededor de la rodilla, de modo que el orificio central quede sobre la rótula. Cerrar la tira superior, donde se encuentra ubicado el logo PROFIT.
3. Pasar las dos tiras de la cincha por los recortes y luego por los pasadores a ambos lados.
4. Cerrar la tira inferior de la rodillera.
5. Ajustar y cerrar las tiras de la cincha, en forma cruzada, en la felpa bajo la rótula.
6. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Interior: Policloropreno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- * Enfermedad de Osgood Schletter
- * Síndrome patelo-femoral
- * Tendinitis patelar
- * Tendinosis
- * Tendinitis
- * Rodilla de saltador
- * Tenosinovitis
- * Rodilla de futbolista
- * Patología meniscal
- * Lesiones osteocondrales
- * Osteocondritis disecante
- * Condromalacia rotuliana
- * Subluxaciones de rótula
- * Hipermovilidad de la rótula

Productos relacionados

R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - ER1 - RAS

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	85 g / 0,85 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global