



Nombre

Rodillera Air Sport con banda dinámica de ajuste

Air Sport knee support with dynamic adjustable strap

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión a la articulación y los ligamentos. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. La banda de ajuste con abrojo, aporta fuerzas adicionales de compresión. Puede ser utilizada en ambas rodillas.

El tejido tubular respirable sin costuras y anatómico permite practicar deportes sin la acumulación de humedad.

Código externo

1302.RAS2N

Código interno

P461PRAS2N

Modo de acción

La rodillera aplica fuerzas multidireccionales en la rodilla que mantienen las articulaciones en una posición neutra. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones del codo se logra mediante la estabilización de la articulación y la aplicación de compresión localizada sobre la zona, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración. La banda de ajuste aporta fuerzas adicionales para brindar soporte a los ligamentos y mayor estabilización a la articulación.

Materialidad

El spandex, poliéster y elastodieno, brindan elasticidad al producto. El spandex es un material de secado rápido, resistente a la sudoración, que no genera electricidad estática y cuenta con un alto grado de recuperación elástica. El poliéster, posee un excelente cuadro de propiedades mecánicas, tenacidad elevada y características de deslizamiento y resistencia al desgaste superiores. Este material también se destaca por su alto grado de respirabilidad.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno 5 cm arriba de la rótula

| S | 36 - 39 cm | 7798128676179 |
|----|------------|---------------|
| M | 40 - 44 cm | 7798128676186 |
| L | 45 - 49 cm | 7798128676193 |
| XL | 50 - 54 cm | 7798128676209 |

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Envase | Bolsa |
| Cantidad | 1 unidad |
| Color | Negro con naranja |
| NCM | 6117.80.90.000K |
| Peso sin envase | 0.100 kg |
| Peso con envase | 0.113 kg |
| Volumen con envase | 0,0019375 m ³ |
| Industria/Origen | Argentina |

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

1. Tomar la rodillera por su abertura más grande, introducir la pierna hasta que el sector rayado quede ubicado sobre la rótula.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
3. Pasar la banda de ajuste por el pasador, cruzando ambos extremos por la parte inferior de la rótula, hasta llegar al cuádriceps, abrochando primero el extremo con felpa y gancho, para luego ajustar el otro.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado el abrojo. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Elastodieno 49%, Poliéster 43%, Elastano 8%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- * Miositis
- * Bursitis
- * Artritis
- * Lesiones inflamatorias
- * Esguinces leves
- * Inestabilidad articular
- * Tendinitis paletar.

Productos relacionados

RAS - VDNE - VENA - VD