



Nombre

## Rodillera con Apertura Rotuliana Open Patella Knee Support

Código externo

03.02.R3

Código interno

16.R3

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. La apertura rotuliana ayuda a contener y estabilizar la rótula. Brinda soporte y contención durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Puede utilizarse en ambas rodillas.

Modo de acción

La apertura rotuliana mantiene la articulación en una posición neutra. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones de rodilla se logra mediante la estabilización de la articulación, aplicando compresión moderada sobre la zona. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3.5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es confortable al contacto con la piel y contribuye a la contención del calor.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno 5 cm, por sobre la rótula

|           |             |               |
|-----------|-------------|---------------|
| <b>S</b>  | 36 - 41 cm. | 7798094546254 |
| <b>M</b>  | 41 - 46 cm. | 7798094546261 |
| <b>L</b>  | 46 - 51 cm. | 7798094546278 |
| <b>XL</b> | 51 - 56 cm. | 7798094546285 |

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Colocar la rodillera situando el orificio sobre la rótula, el logo PROFIT se encuentra ubicado en la parte inferior, al frente.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- \* Artrosis
- \* Artritis
- \* Contusiones
- \* Desorden patelo femoral leve
- \* Distensiones
- \* Esguinces leves
- \* Hinchazón
- \* Tendinitis patelar

Composición

Interior: Policloropreno 100%  
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

R2 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - R9 - ER1 - RAS

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Envase             | <b>Bolsa</b>           |
| Cantidad           | <b>1 unidad</b>        |
| Color              | <b>Negro</b>           |
| NCM                | <b>6307.90.90</b>      |
| Peso sin envase    | <b>65 g / 0,065 Kg</b> |
| Peso con envase    |                        |
| Volumen con envase |                        |
| Industria/Origen   | <b>Argentina</b>       |

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.  
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10  
CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global