



Nombre

### Rodillera elástica

Elastic knee support

Código externo

03.02.ER1

Código interno

45.ER1

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones leves, mediante la aplicación de compresión y soporte a la articulación. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Elaborada a partir de un tejido tubular elástico que aplica baja compresión, de manera homogénea. Puede utilizarse en ambas rodillas.

Modo de acción

El tejido tubular aplica presión de manera homogénea y mantiene la rodillera en su lugar durante la práctica deportiva. Mediante la estabilización de la articulación, aplicando compresión moderada, se logra el alivio de distensiones, esguinces y demás lesiones.

Materialidad

Elaborada a partir de un tejido elástico sin costuras, compuesto por un alto porcentaje de algodón, material hipoalérgico apto para el contacto constante con la piel.

#### Tabla de talles / Código de barras

Según circunferencia 5 cm sobre la rótula.

S	36 - 39 cm	7798128671389
M	40 - 45 cm	7798128671396
L	46 - 51 cm	7798128671402
XL	52 - 58 cm	7798128671419
XXL	59 - 68 cm	7798128671426

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Crudo
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	30 g / 0,03 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

#### Instrucciones de uso

1. Introducir la pierna dentro de la rodillera.
2. Deslizar hacia arriba, hasta que el producto esté ubicado sobre la rodilla.
3. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

#### Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

#### Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



#### Patologías

- \* Contusiones
- \* Distensiones
- \* Esguinces leves
- \* Hinchazón
- \* Tendinitis patelar

#### Composición

Algodón 76%, Elastodieno 24%

#### Productos relacionados

R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - R9 - ET1 - EU1 - EM1 - MAS - TAS - RAS

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:  
www.ptm.global - info@ptm.global