



Nombre

Tobillera con Ajuste de Elástico en Ocho

Ankle Support With Figure Eight Strap

Código externo

03.01.T2

Código interno

16.T2

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. Su diseño cerrado ofrece una contención uniforme en todo el tobillo. Las tiras elásticas permiten una mejor sujeción del producto y regulabilidad. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Puede utilizarse en ambos tobillos.

Modo de acción

La tobillera aplica fuerzas que mantienen la articulación en una posición neutra. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones del tobillo se logra mediante la estabilización de la articulación, aplicando compresión moderada sobre la zona. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3.5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislamiento térmico, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es cómodo al contacto con la piel y contribuye a la contención del calor.

Tabla de talles / Código de barras

Según número de calzado

S	35 - 38	7798094546469
M	38 - 40	7798094546476
L	40 - 42	7798094546483
XL	42 - 45	7798094546490

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

1. Introducir el pie a través de la tobillera. El logo PROFIT debe quedar en la parte superior, hacia el frente.
2. Deslizar hacia arriba, haciendo que el orificio coincida con el talón.
3. Cruzar las tiras elásticas por sobre el empeine y ajustarlas entre sí en la parte posterior del tobillo.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado el abrojo. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Interior: Policloropreno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- * Síndrome del túnel tarsal - o síndrome del túnel tarsiano o neuralgia del nervio tibial posterior-
- * Pie cavo varo, recto o valgo
- * Pie cavo anterior o posterior
- * Esguinces
- * Inestabilidad
- * Pie zambo
- * Inestabilidad crónica del tobillo
- * Luxaciones
- * Afecciones ligamentarias
- * Artritis

Productos relacionados

T1 - T3 - 6400