



Nombre

## Tobillera elástica

### Elastic ankle support

Código externo

03.01.ET1

Código interno

45.ET1

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones leves, mediante la aplicación de compresión y soporte a la articulación. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Elaborada a partir de un tejido tubular elástico que aplica baja compresión, de manera homogénea. Puede utilizarse en ambos tobillos.

Modo de acción

El tejido tubular aplica presión de manera homogénea y mantiene la tobillera en su lugar durante la práctica deportiva. Mediante la estabilización de la articulación, aplicando compresión moderada, se logra el alivio de distensiones, esguinces y demás lesiones.

Materialidad

Elaborada a partir de un tejido elástico sin costuras, compuesto por un alto porcentaje de algodón, material hipoalérgico apto para el contacto constante con la piel.

#### Tabla de talles / Código de barras

Según número de calzado.

S	35 - 38	7798128671334
M	38 - 40	7798128671341
L	40 - 42	7798128671358
XL	42 - 45	7798128671365
XXL	45 - 47	7798128671372

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Crudo
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	30 g / 0,03 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

#### Instrucciones de uso

1. Introducir el pie en la tobillera.
2. Deslizar hacia arriba, haciendo que el orificio coincida con el talón.
3. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

#### Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



#### Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

#### Patologías

- \* Esguinces
- \* Inestabilidad
- \* Tendinitis
- \* Síndrome del túnel tarsal
- \* Afecciones ligamentarias
- \* Contusiones
- \* Distensiones
- \* Esguinces leves
- \* Hinchazón

#### Composición

Algodón 76%, Elastodieno 24%

#### Productos relacionados

T1 - T2 - T3 - 6400 - ER1 - EU1 - EM1 - MAS - TAS - RAS

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global